




rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
[www.rehangrip.at](http://www.rehangrip.at)

Montage- und Gebrauchsanleitung für:

Sicherheits- Seitenwand- und Winkelgriffe,  
Wand-Handläufe, Einstiegshilfen

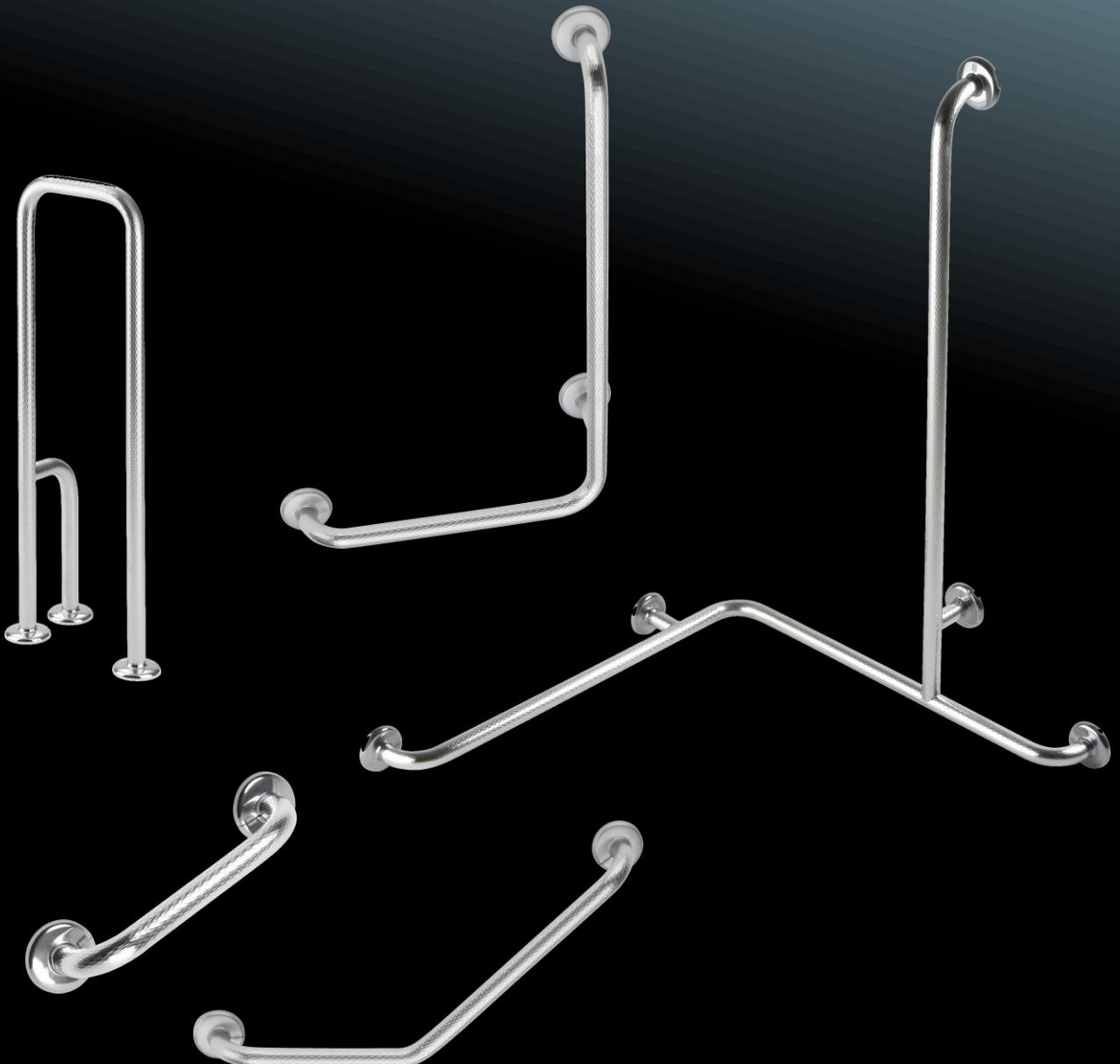

Sehr geehrte Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Rehagrip-Produkt entschieden haben.

Wir wünschen uns, dass unser Produkt Sie zu Ihrer vollsten Zufriedenheit unterstützt.

Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungs- und Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf, damit Sie bei Bedarf darin nachlesen können.

Sollten Sie diese Montage- und Gebrauchsanleitung nicht lesen können, haben Sie die Möglichkeit dieses Dokument als PDF-Datei unter [www.rehagrip.at](http://www.rehagrip.at) herunterzuladen oder bei unserer Service Abteilung (Adresse und Telefonnummer siehe auf der Rückseite) anzufordern.

Die PDF-Datei kann auch in vergrößerter Form dargestellt werden.

Sämtliche Artikelnummern zu den jeweiligen Produkten, finden Sie in unserer Produkt-, Preisliste und auf unserer Homepage.

Alle Bemaßungen in dieser Montage- und Gebrauchsanleitung sind in Millimeter mm angegeben.

### **Inhaltsverzeichnis:**

Verwendungszweck	3
Warnhinweise	3
Wartung	4
Reinigungs- und Pflegehinweise	4
Transportschäden	4
Materialbeschreibung	5
Montagehinweis / Montagebeispiel	6 - 10
Zubehör	11
Gesamtdimension	12 - 16
Masse der Griffe	17

Dieses Medizinprodukt ist konform der Richtlinie 93/42/EWG.

## Verwendungszweck:

Unsere Sicherheits-, Winkelgriffe und Wandhandläufe sind vorwiegend für den Einsatz im Sanitär- und/oder WC-Bereich in Spitälern, Rehabilitationszentren, div. Heime und im privaten Bereich ausgelegt.

Je nach Bedarfssituation können diese Griffe auch in anderen Bereichen verwendet werden.

Sie bieten Halte- und Stützmöglichkeiten, erleichtern den Ein- und Ausstieg aus einer Badewanne, ermöglichen das eigenständige Aufstehen bzw. Setzen von Erwachsenen und Kindern mit körperlichen Einschränkungen, mit Schäden am Bewegungsapparat, Bein-, oder Armprothetik und / oder motorischen Einschränkungen.

## Warnhinweise:

Die Rehagrip Haltegriffe sind für eine maximale Belastung von bis zu 150 kg (für Personen mit max. 150 kg) ausgelegt.

Die max. Belastung ist auch auf dem Aufkleber an den Griffen ersichtlich.



Beim Überschreiten der Belastungswerte können dauerhafte Schäden am Griff auftreten. In diesem Fall muss der Griff unverzüglich von einem dafür qualifizierten Fachpersonal oder Wartungsunternehmen untersucht werden.

Verwenden Sie die Griffe nur wie in unserer Gebrauchsanweisung beschrieben.

Bei Zweckentfremdung, z. B.: als Steighilfe oder Turngerät kann es zu Unfällen mit Verletzungen kommen.




Kinder dürfen die Griffe nur in Anwesenheit eines Erwachsenen (geschultes Pflege – Betreuungspersonal) nutzen.


Bei Benutzung durch Kinder ist darauf zu achten, dass diese nicht mit den Kopf zwischen den Griff und der Wand geraten. Es besteht Strangulationsgefahr.



Achtung! Bei Montage in heißen Räumen (z.B. Sauna, Dampfbad) oder bei direkter Sonneneinstrahlung im Freien, können die Griffe eine Oberflächentemperatur von über 41°C erreichen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

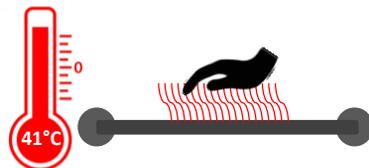

Im Freien oder in Räumen mit Umgebungstemperatur unter 0°C kann es zu Vereisungen der Griffoberfläche kommen. Ein sicherer Halt ist dann nicht mehr gegeben.

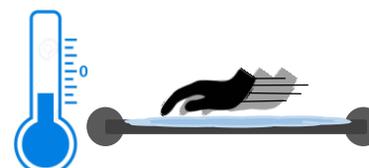

Um eine einwandfreie und sichere Benutzung der Rehagrip Sicherheitsgriffe gewährleisten zu können, darf die Montage ausschließlich vom qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden (z. B.: Sanitär-Installateure).

Bei nicht fachgerechter Montage, kann es bei Verwendung zu massiven Verletzungen kommen. Es wird dringend von einer Selbstmontage abgeraten!!

Bei der fachgerechten Durchführung der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dass der Griff bündig an der Befestigungsfläche der Wand montiert werden muss. Nicht auf z.B.: vorstehenden Fugen, Fliesenversatz oder sonstigen Unebenheiten. Weiters ist darauf zu achten, dass die Wand an der der Griff befestigt wird keine Schwachstellen aufweist. Nach der Montage bzw. vor Benutzung des Griffes muss eine Stabilitätsprüfung durchgeführt werden.

Bei Montage die Oberfläche der Griffe vor Baustaub, Eisenstaub und Schmutz schützen. Griff nicht unnötig ohne Verpackung herumliegen lassen. Bei Verletzung der Oberfläche durch Stahlwerkzeug (Hammer, Schraubendreher- Schlüssel usw.) kann es an der beschädigten Stelle zur Korrosion kommen.

Bei Einhaltung sämtlicher Hinweise wird eine 13 - jährige Lebensdauer der Griffe garantiert. Ausgenommen sind: Kunststoffteile (div. Abdeckungen) und Montagematerial. Diese Verschleißteile können Sie unter [www.rehagrip.at](http://www.rehagrip.at) oder bei unserer Service-Abteilung (Adresse und Telefonnummer siehe auf der Rückseite) als Ersatzteil erwerben.

Bei nicht einhalten der Warnhinweise bzw. unsachgemäßer Handhabung und/oder mangelhafter Montage, insbesondere unter Missachtung der aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise übernimmt die Firma Christian Stögerer e.U.-Rehagrip keine Haftung für Personen- oder Sachschäden!

## Reinigungs- und Pflegehinweise:

Zur Reinigung reicht in der Regel einfaches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Größere Verunreinigungen können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern (keine säurehaltigen Reiniger und/oder mit Scheuermittelzusatz) entfernt werden. Bei Verwendung von Reinigungsmitteln, müssen die Anwendungshinweise sowie die Gebrauchsanleitung des Herstellers befolgt werden.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien wie z. B.: Bürsten und Scheuerlappen.

Je nach Bedarf, kann auch Desinfektionsmittel mit bis zu 98% Alkoholanteil verwendet werden. Durch Nachpolieren mit einem trockenen Tuch können eventuell entstandene Wasserflecken entfernt werden.

Vor der Wiederverwendung muss der gereinigte Griff unbedingt trocken sein (Abrutscht Gefahr!) und es dürfen sich keine Reinigungsmittelrückstände auf der Oberfläche befinden.

Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen!


## Hinweise des Aufklebers am Griff:

**Der Aufkleber befindet sich auf der Flanschrückseite der Griffe.**

Um welchen Griff handelt es sich.

Maximale Belastbarkeit des Griffes.

Datum der Herstellung.

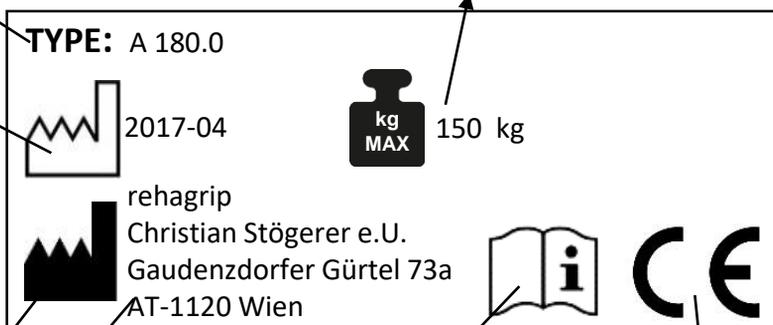

Wo wurde der Griff produziert.

Montage- und Gebrauchsanweisung wird mit dem Griff mitgeliefert und ist auf unserer Homepage abrufbar.

Produkt entspricht den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind.

## Wartung:

Sämtliche Rehagrip Haltegriffe sind Wartungsfrei! Dennoch sollten die Befestigungen der Griffe zumindest einmal im Quartal ausschließlich vom dafür qualifizierten Fachpersonal überprüft und gegebenenfalls, Beanstandungen behoben werden. Um die Möglichkeit einer Verletzung zu vermeiden, führen Sie die Überprüfung auf keinen Fall selbst durch!

Bei unsachgemäßer bzw. nicht durchgeführter Kontrolle übernimmt die Firma Christian Stögerer e.U.-Rehagrip keine Haftung für Personen- oder Sachschäden!

Entsorgen Sie das Produkt und das Verpackungsmaterial nicht über den Hausmüll. Bringen Sie es zu den von örtlichen Behörden zugewiesenen Sammelstellen.




## Transportschäden:

Das von uns produzierte Produkt hat unser Werk in einem einwandfreien Zustand verlassen.

Um eventuelle spätere schwerwiegende Funktionsbeeinträchtigungen und die daraus resultierende Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, muss bei Annahme das Produkt auf offensichtliche, leicht erkennbare Mängel geprüft werden. Eine Reklamation kann nur innerhalb von 3 Tagen ab Warenerhalt erfolgen. Bei versteckten Mängeln innerhalb von 3 Wochen. Die Ware darf nur trocken und druckfrei gelagert werden.

## Materialbeschreibung:

Die Griffe werden aus **Edelstahl- Werkstoff 1.4301** (Kurzbezeichnung: X5CrNi1810, Legierungsbestandteile: 18% Chrom, 10% Nickel) gefertigt. Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und Desinfektionsmittelbeständig.

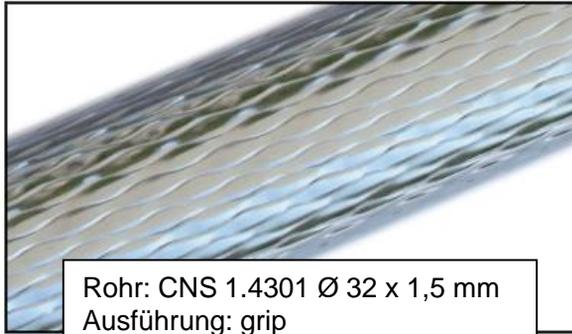

Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm  
Ausführung: grip  
Profiltiefe: 0,15 mm – 0,20 mm  
Oberfläche: elektropoliert



Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm  
Ausführung: glatt  
Oberfläche: glatt poliert und elektropoliert


Div. Kunststoffteile wie z.B. Kugelstopfen und Abdeckkappen werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis -40°C über eine sehr gute Zähigkeit.

Unsere Griffe sind auf Wunsch in div. Farben pulverbeschichtet erhältlich.

Die Pulverbeschichtung ist ein umweltfreundliches Beschichtungsverfahren, da es frei von Schwermetallen und Lösungsmittel ist.

Die Beschichtung zeichnet sich durch eine unübertroffene Farbbeständigkeit und Glanzerhaltung, sowie eine hohe chemische Beständigkeit aus. Durch die relativ hohen Schichtdicken wird eine sehr gute Festigkeit gegenüber mechanischen Belastungen erreicht.

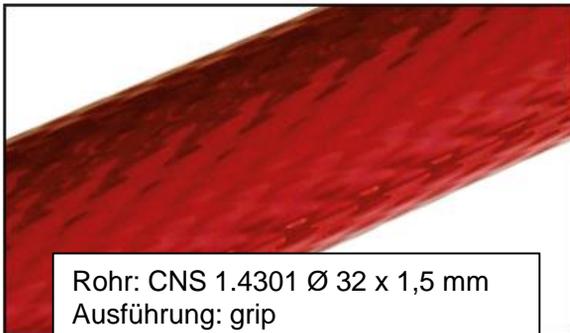

Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm  
Ausführung: grip  
Profiltiefe: 0,15 mm – 0,20 mm  
Oberfläche: pulverbeschichtet



Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm  
Ausführung: glatt  
Oberfläche: pulverbeschichtet

## Farbkarte:



weiß  
RAL 9010

manhattan  
sanitär

anthrazit  
RAL 7016

pergamon  
sanitär

bahamabeige  
sanitär

rubinrot  
RAL 3003

dunkelrot  
RAL 3007


gelb  
RAL 1004

blau  
RAL 5002







schwarzgrün  
RAL 6012

moosgrün  
RAL 6005

## Montagebeispiel:

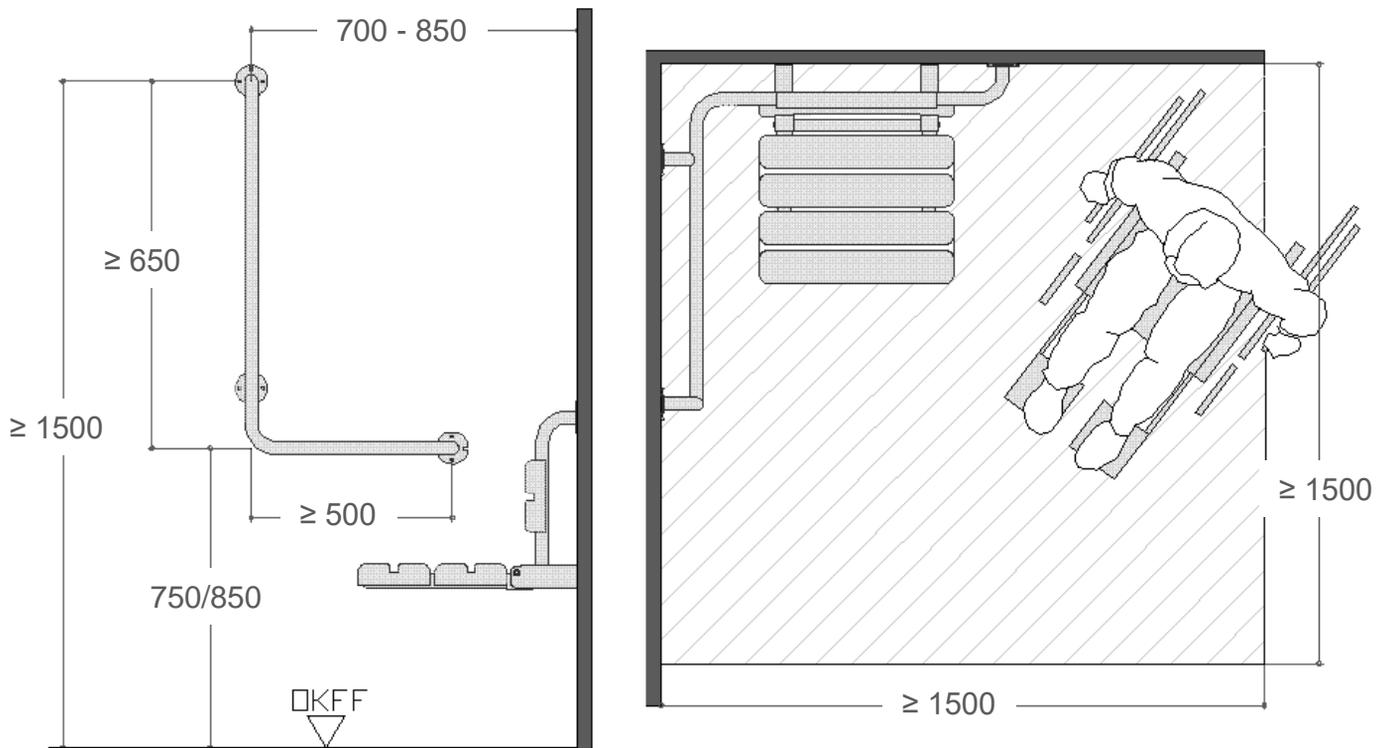

	DIN 8041-1	ÖNORM B 1600
Grundfläche Duschplatz	mind. 1500 x 1500 mm	mind. 1500 x 1500 mm bzw. 1300 x 1500 mm
Haltegriffe montieren	Waagrecht und senkrecht	Waagrecht und senkrecht
Abstand senkrechter Griffe bis zur Wandecke	-	700 – 800 mm
senkrechte Griffhöhe	-	≥ 1500 mm
senkrechte Grifflänge	-	≥ 650 mm
waagrechte Griffhöhe	850 mm von OKFF bis Griff (Achismaß)	750 mm von OKFF bis Oberkante Rohr
waagrechte Grifflänge	-	≥ 500 mm

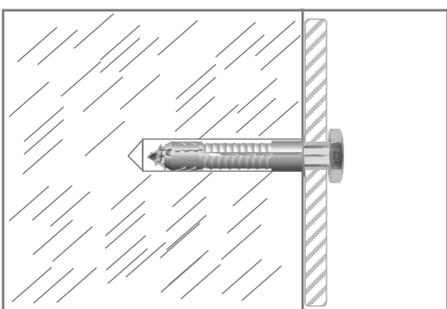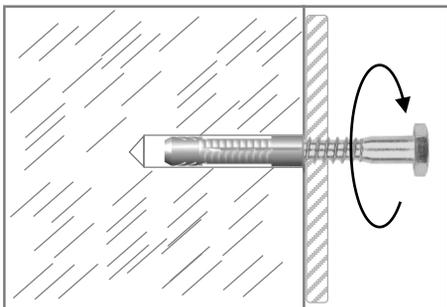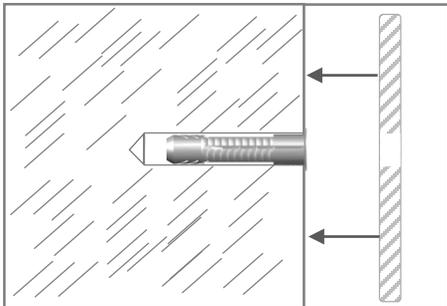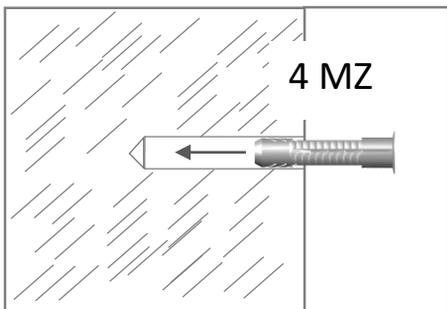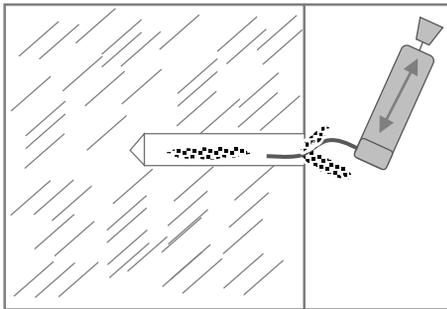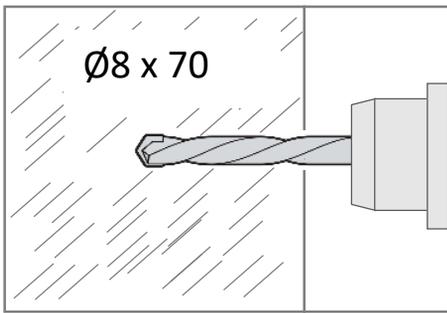

### Montagehinweis:


Zur Befestigung der Griffe an massiven Wänden wird das Standard- Befestigungsmaterial mitgeliefert, es besteht aus:

Mehrzweckdübel 4 MZ 8 x 49 und


Sechskant-Holzschrauben A2 6 x 70 DIN 571

Geeignet zur Befestigung an folgenden Wandtypen:  
*Beton B 25, Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel M 20, Kalksandvollstein KS 12, Vollstein-Leichtbeton V4*



Bei Wandtypen die in dieser Erläuterung nicht angeführt sind, muss eine Fachfirma für Befestigungstechnik hinzugezogen werden.

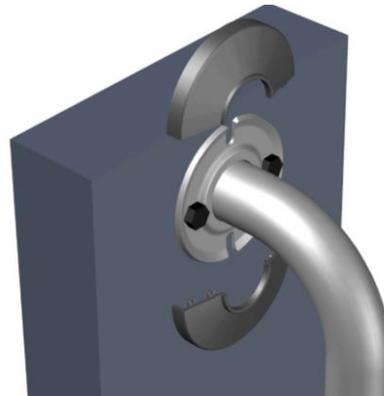

**Montagehinweis:**  
Bohrlochgeometrie:

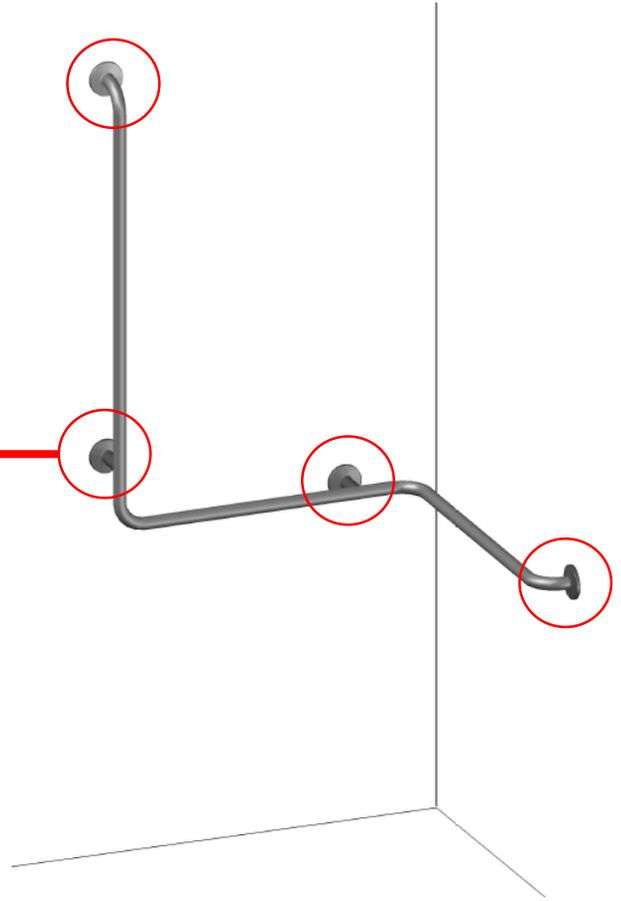


Loch-Oberkante Rohr

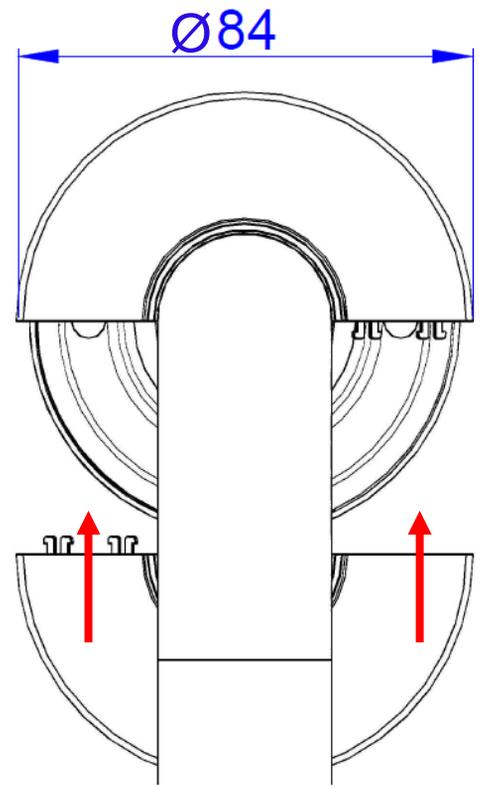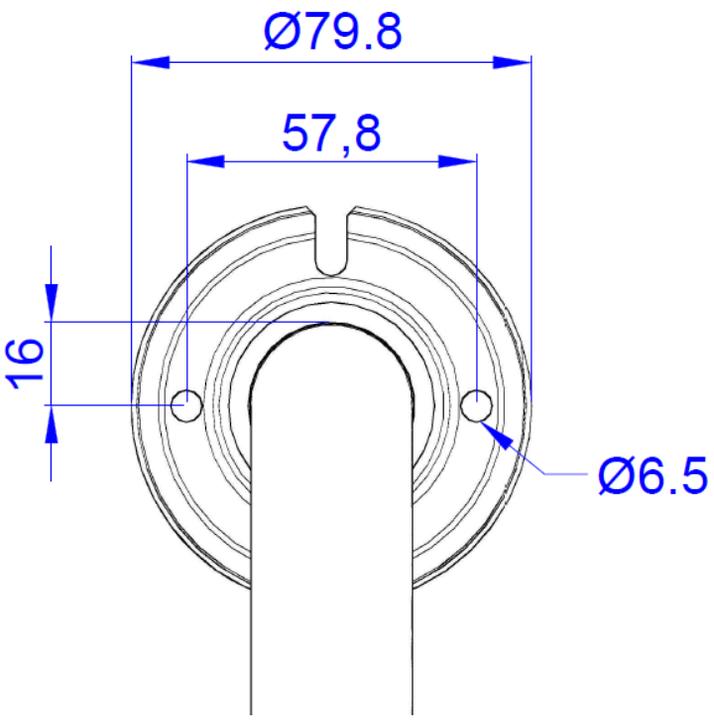


**Montagehinweis:**

Montage des Handbrauseaufsteckschiebers A 113.0 K

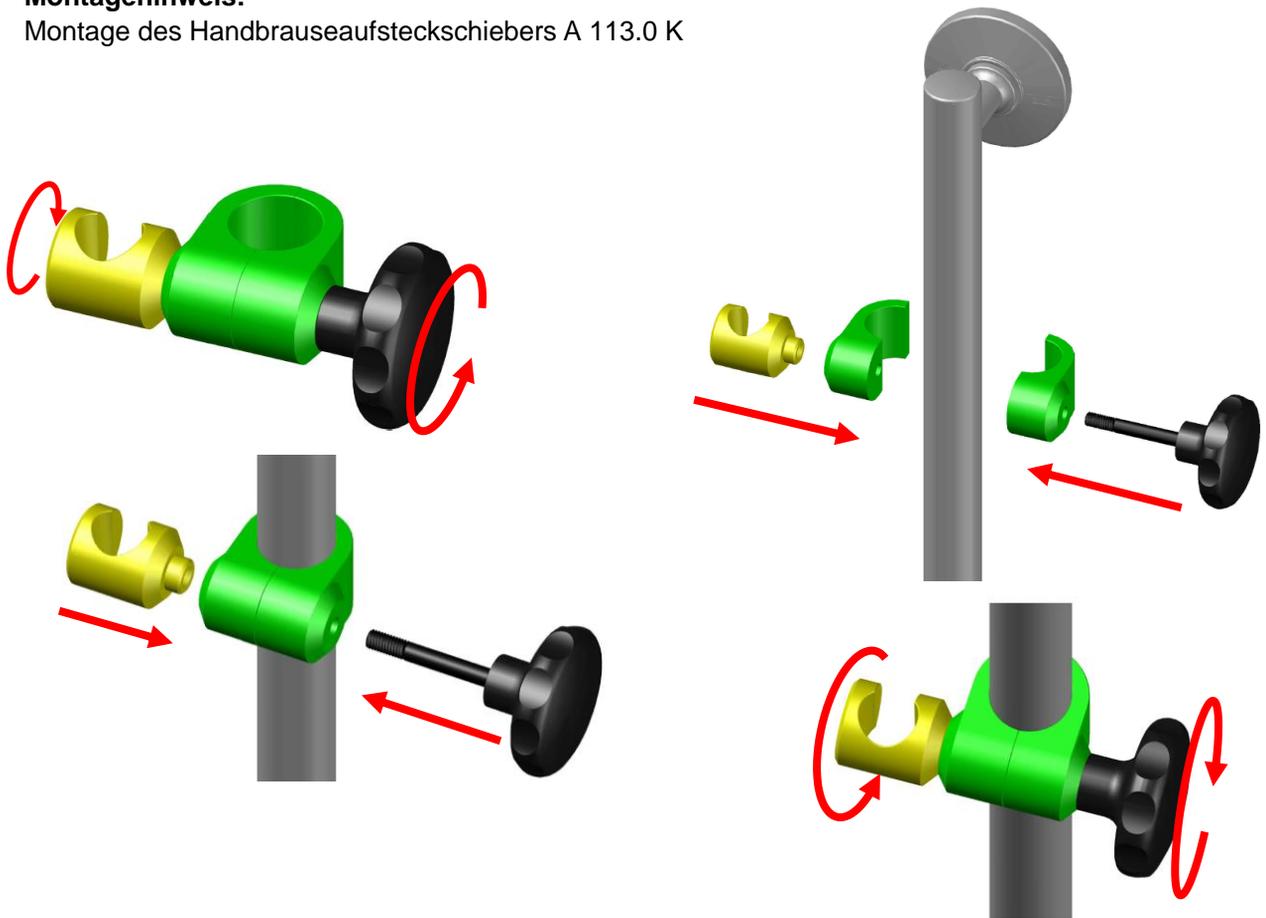


**Montagehinweis:**

Duschlappsitz A154.0

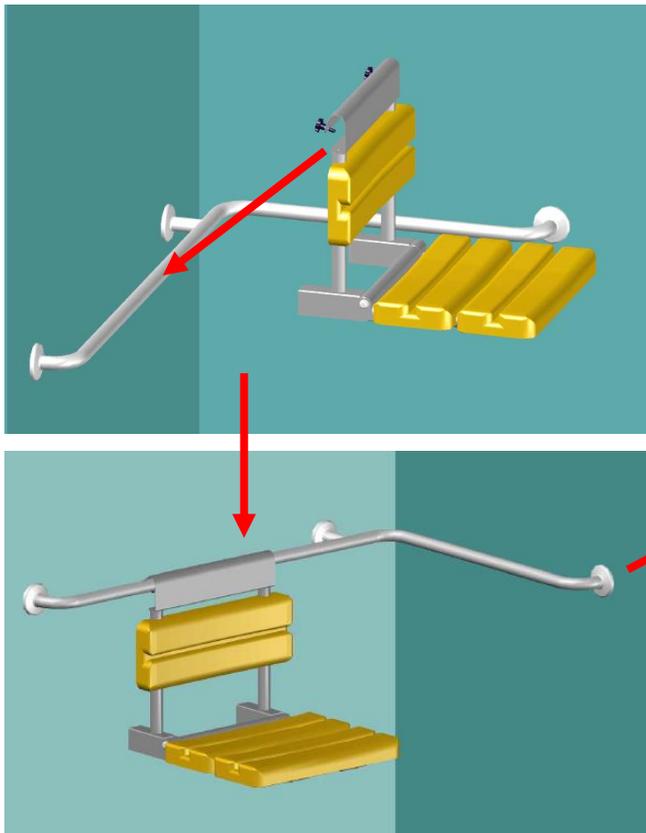


Um ein ungewolltes Aushängen des Sitzes zu verhindern, die Sicherungsschrauben handfest anziehen.

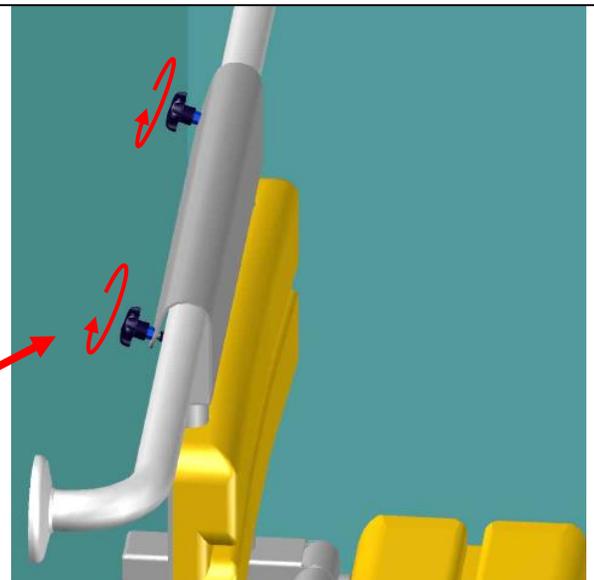


**Montagehinweis:**

Montage des Papierrollenhalters einhängbar

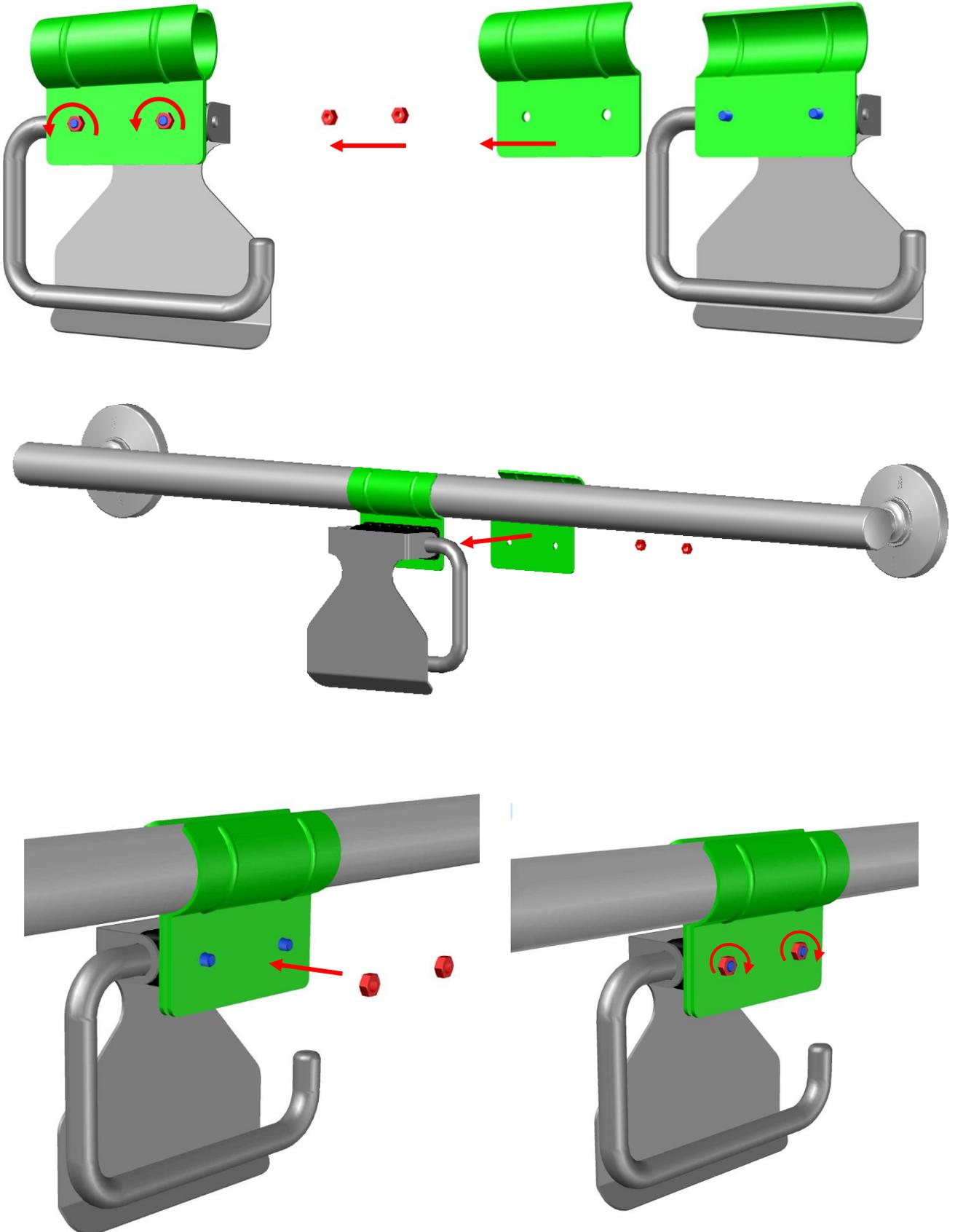

Zubehör::

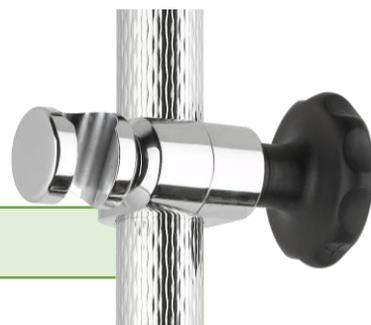

**Handbrause-Aufsteckschieber**

Handbrause-Aufsteckschieber				
Bestellnummern				
	GRIP	GLATT	GRIP Color	GLATT Color
<b>A 113.0 K</b>		537024		537027



**Duschklappsitz zum Ein- u. Aushängen**

Duschklappsitz zum Ein- u. Aushängen				
Bestellnummern				
	GRIP	GLATT	GRIP Color	GLATT Color
<b>A 154.0</b>		533501		535822
<b>A 154.4</b> mit klappbaren Armlehnen		538123		540155


**Papierrollenhalter einhängbar:**

Papierrollenhalter einhängbar:				
Bestellnummern				
	GRIP	GLATT	GRIP Color	GLATT Color
<b>A 92.0 re.</b>		533509		535854
<b>A 92.5 li.</b>		537617		536200




**Gesamtdimensionen:**



Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Sicherheitsgriffe A/E-Serie:

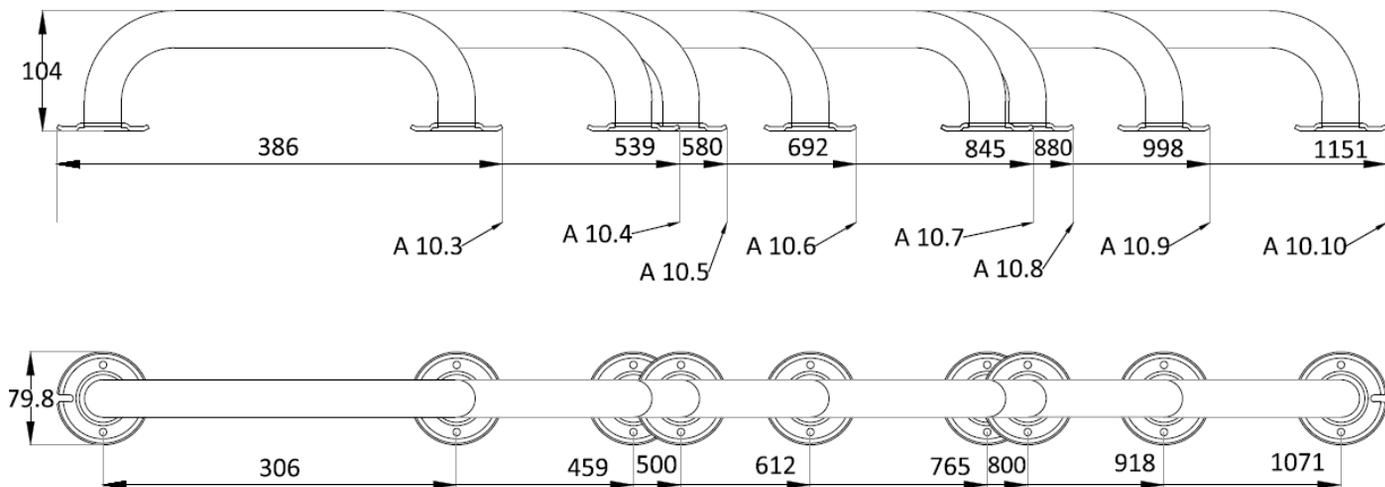



Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Winkelgriffe A/E-Serie:

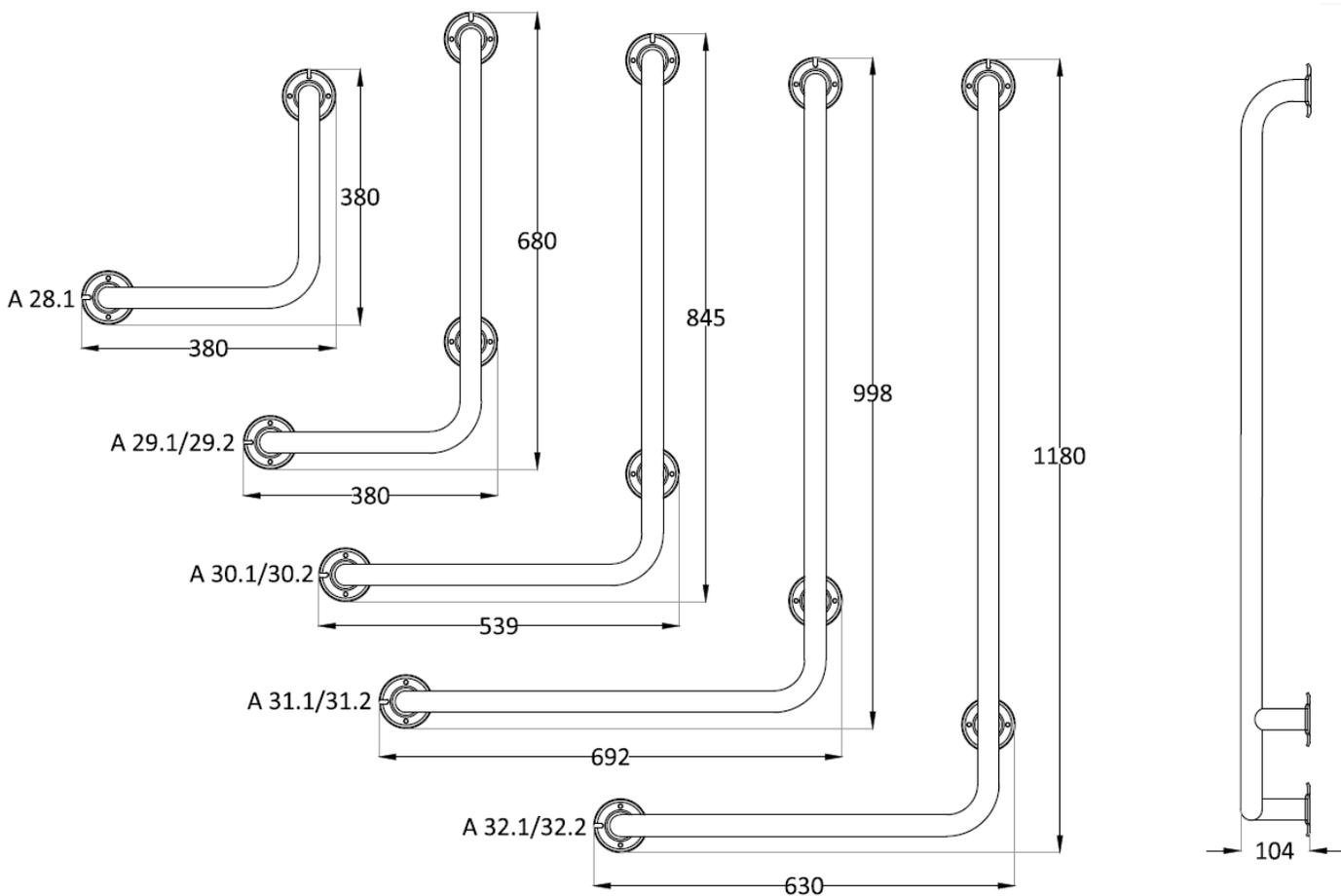

Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Wand-Handlauf A-Serie:



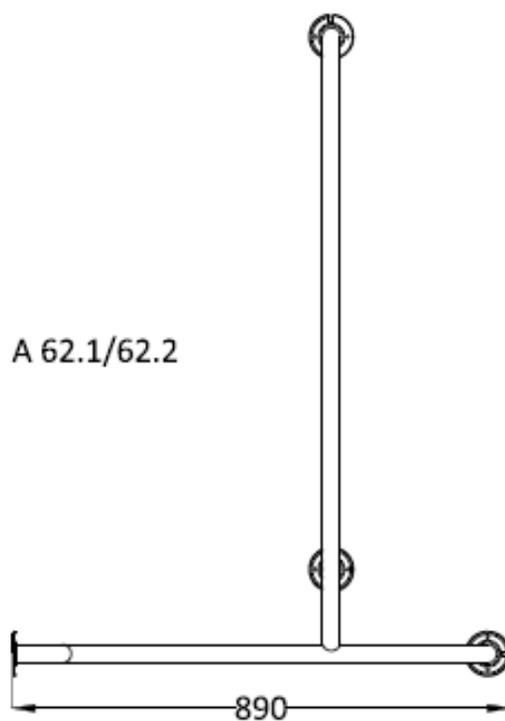
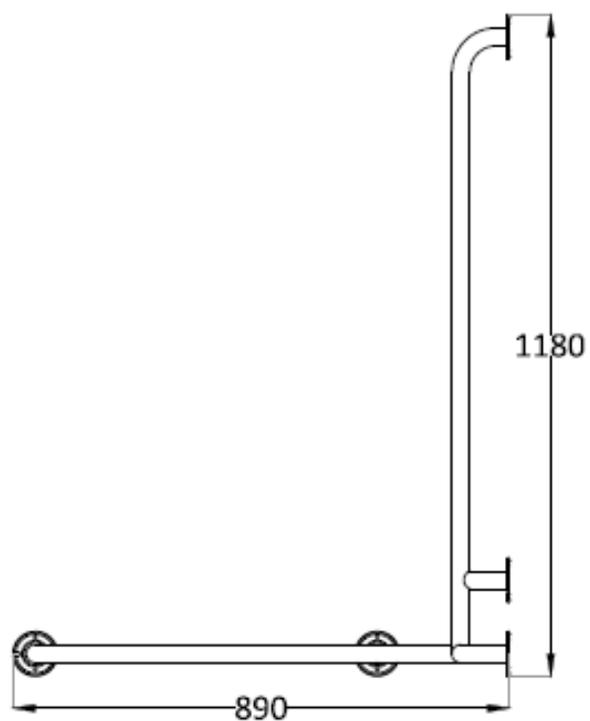



A 62.1/62.2

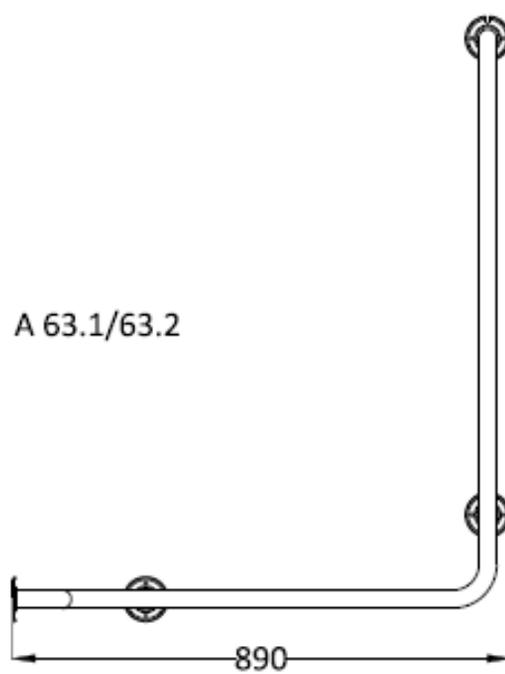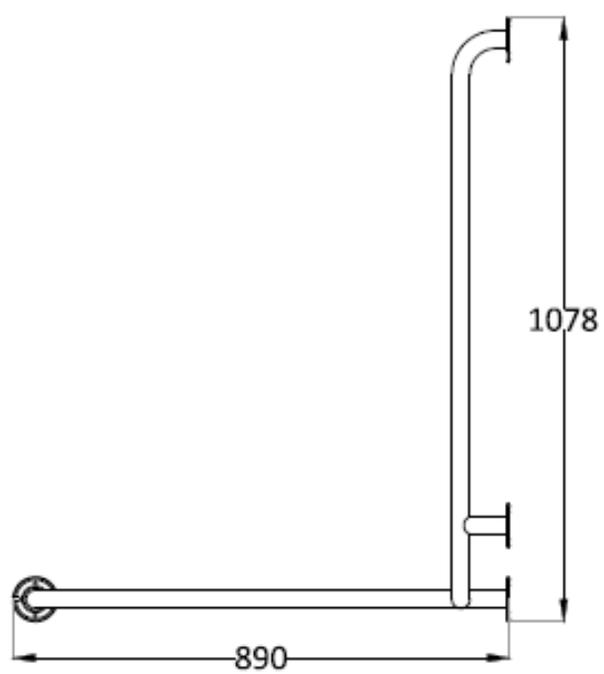


A 63.1/63.2

Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Wand-Handlauf A-Serie:

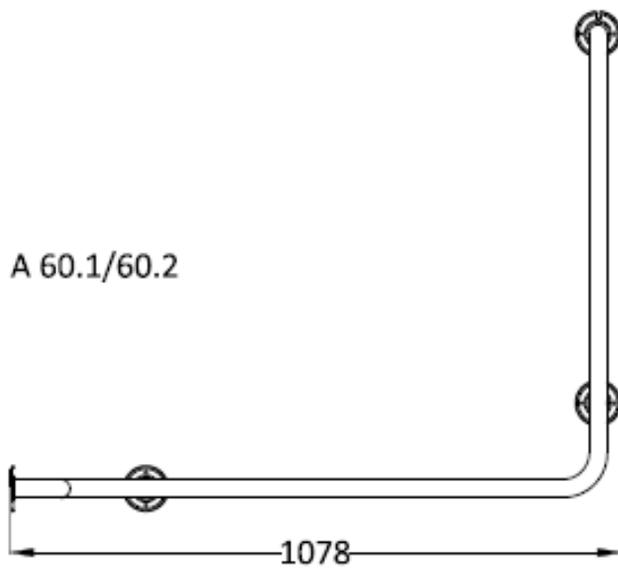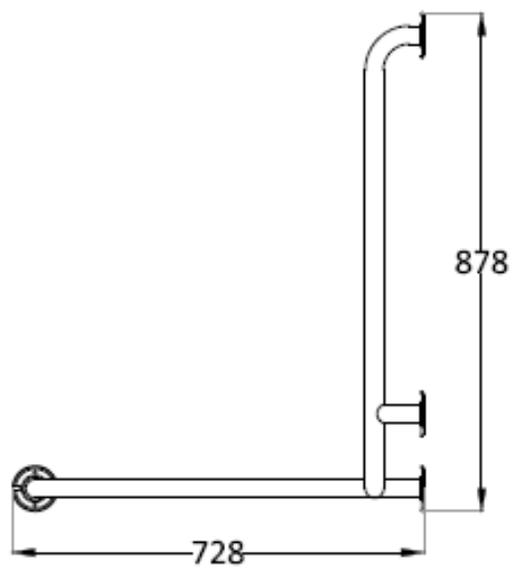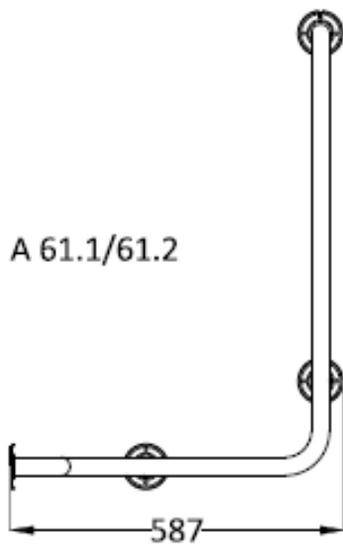
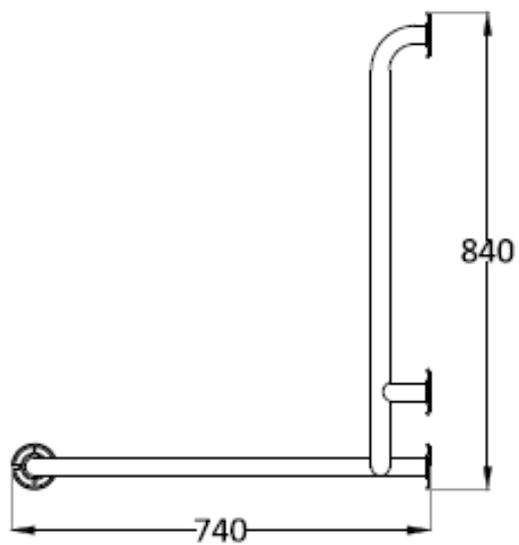


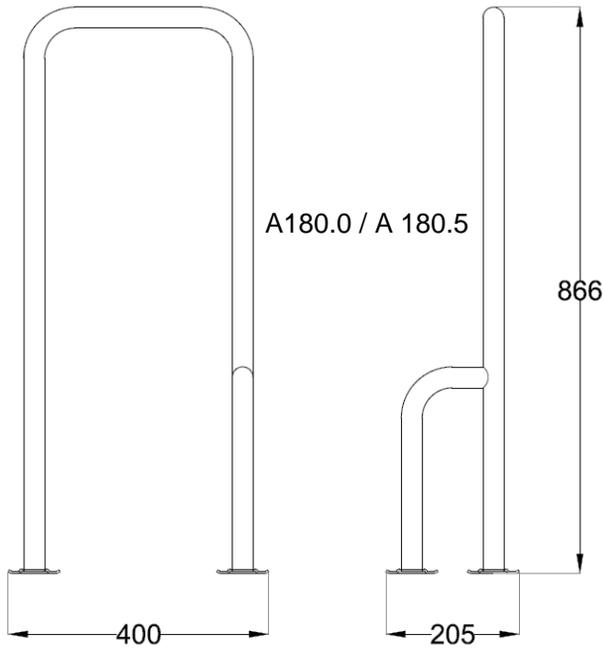





Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten  
Einstiegshilfen:

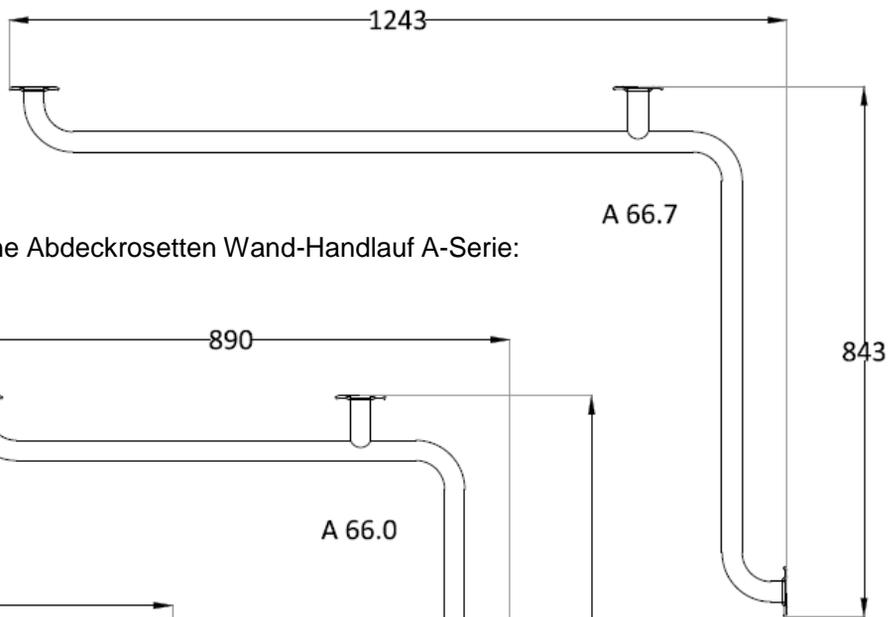


Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Wand-Handlauf A-Serie:

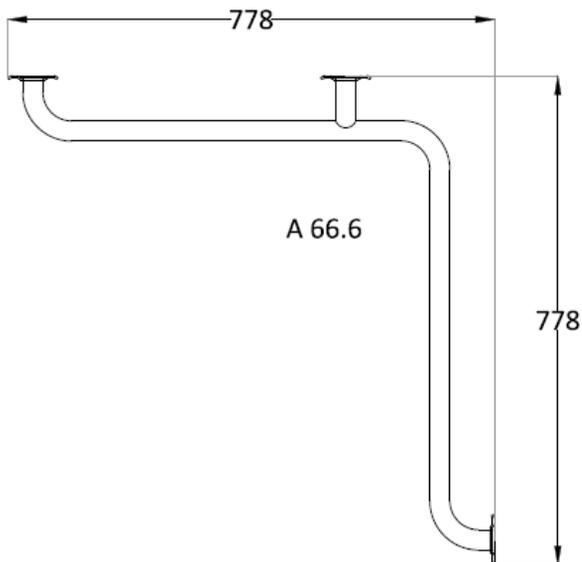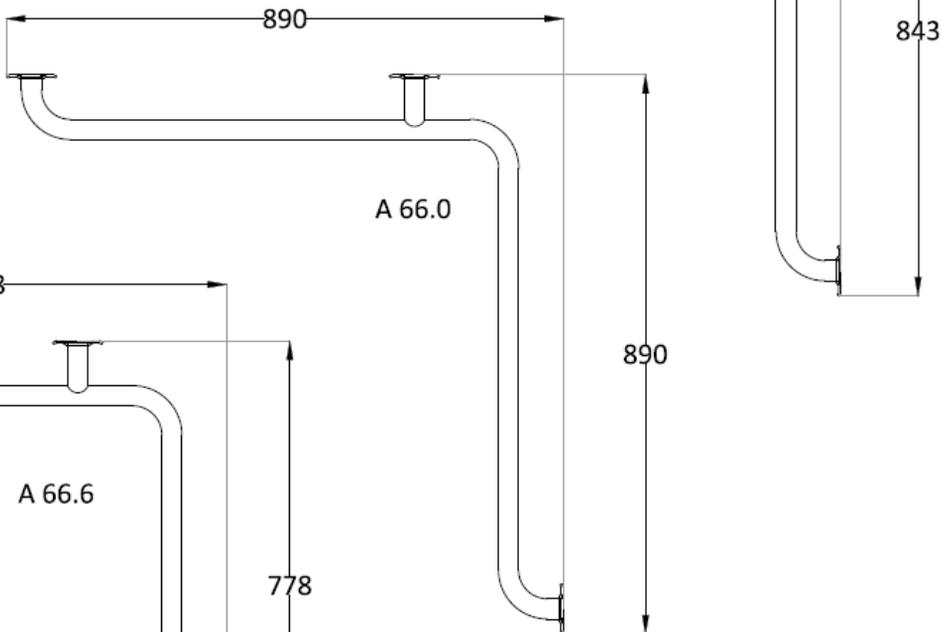

Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Wand-Stützgriffe A-Serie:

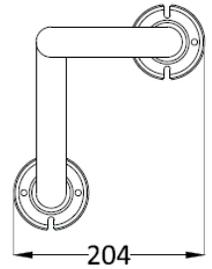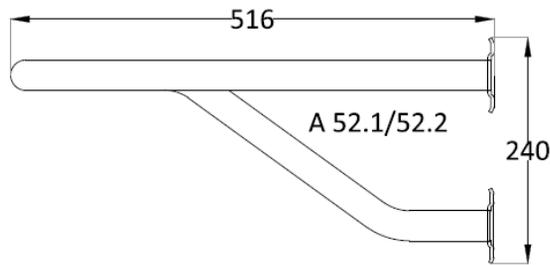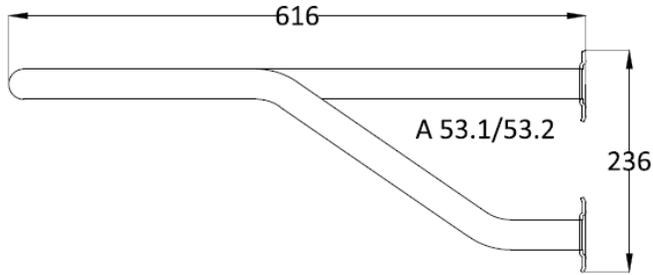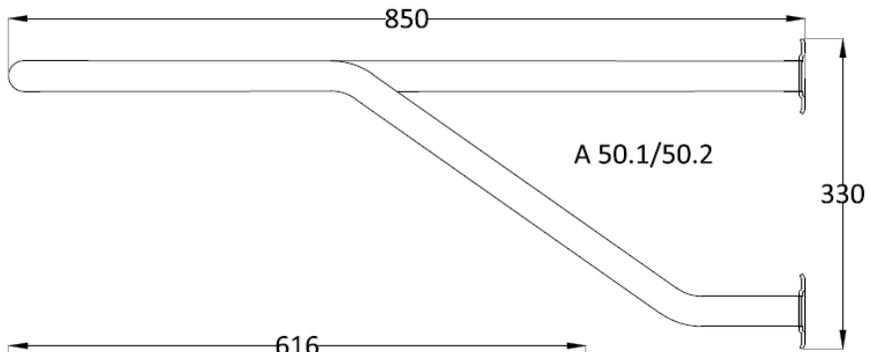

Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Seitenwandgriffe A-Serie:

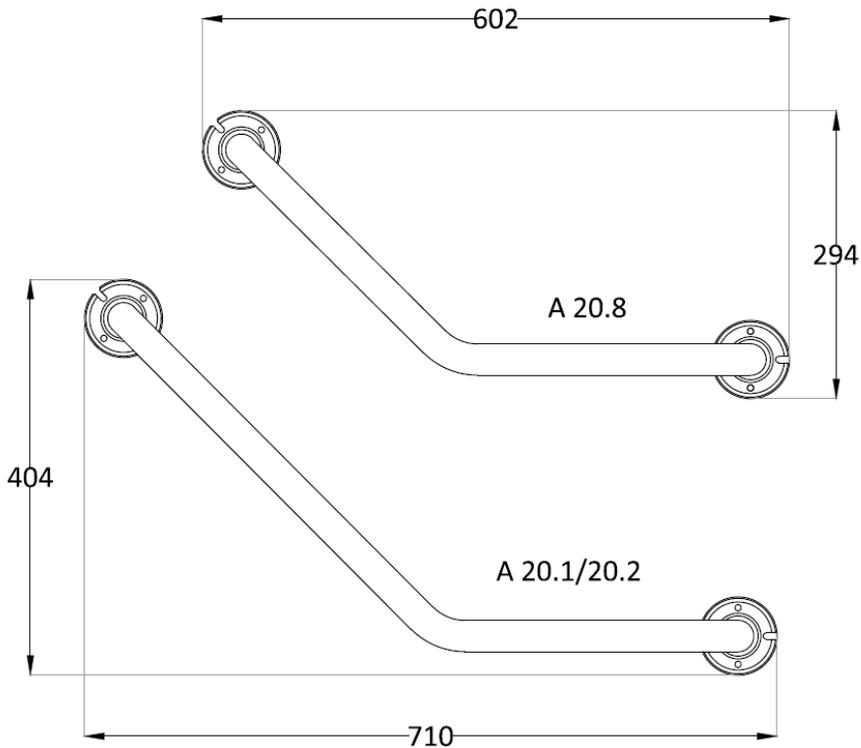

## Masse der Griffe:

### Masse Sicherheitsgriffe:

Typ:	Gewicht:
A 10.3	0,70 kg
A 10.4	0,90 kg
A 10.5	1,00 kg
A 10.6	1,15 kg
A 10.7	1,30 kg
A 10.8	1,35 kg
A 10.9	1,50 kg
A 10.10	1,65 kg
E 10.4	0,85 kg
E 10.6	1,13 kg
E 10.8	1,30 kg
E 10.10	1,60 kg

### Masse Winkelgriffe:

Typ:	Gewicht:
A 28.1	1,33 kg
A 29.1/29.2	1,65 kg
A 30.1/30.2	2,00 kg
A 31.1/31.2	2,30 kg
A 32.1/32.2	2,45 kg
E 31.1/31.2	2,40 kg
E 32.1/32.2	2,60 kg

### Masse Wand-Handlauf:

Typ:	Gewicht:
A 60.1/60.2	3,45 kg
A 61.1/61.2	3,00 kg
A 62.1/62.2	4,00 kg
A 63.1/63.2	3,65 kg
A 66.0	2,30 kg
A 66.6	2,00 kg
A 66.7	2,70 kg

### Masse Wand-Stützgriffe:

Typ:	Gewicht:
A 50.1/50.2	2,15 kg
A 52.1/52.2	1,63 kg
A 53.1/53.2	1,84 kg

### Masse Seitenwandgriffe:

Typ:	Gewicht:
A 20.1/20.2	1,30 kg
A 20.8	1,15 kg

### Masse Einstiegshilfen:

Typ:	Gewicht:
A 180.0/180.5	3,00 kg



Diese Montage- und Gebrauchsanleitung muss vom Monteur an den Benutzer weitergegeben und für die Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden.

Pflege- und Betreuungspersonal ist verpflichtet die Benutzer unserer Produkte laut dieser Information zu Unterweisen.

Auf diese und weitere Informationen, können Sie auch auf unserer Homepage [www.rehagrip.at](http://www.rehagrip.at) zugreifen.



**Christian Stögerer e.U.**  
Gaudenzdorfer Gürtel 73a  
1120 Wien

Tel. (+43) 1-810 57 40  
Fax (+43) 1-810 57 40 – 28  
E-Mail [office@rehagrip.at](mailto:office@rehagrip.at)

