




rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Montage- und Gebrauchsanleitung für:

Kippspiegel

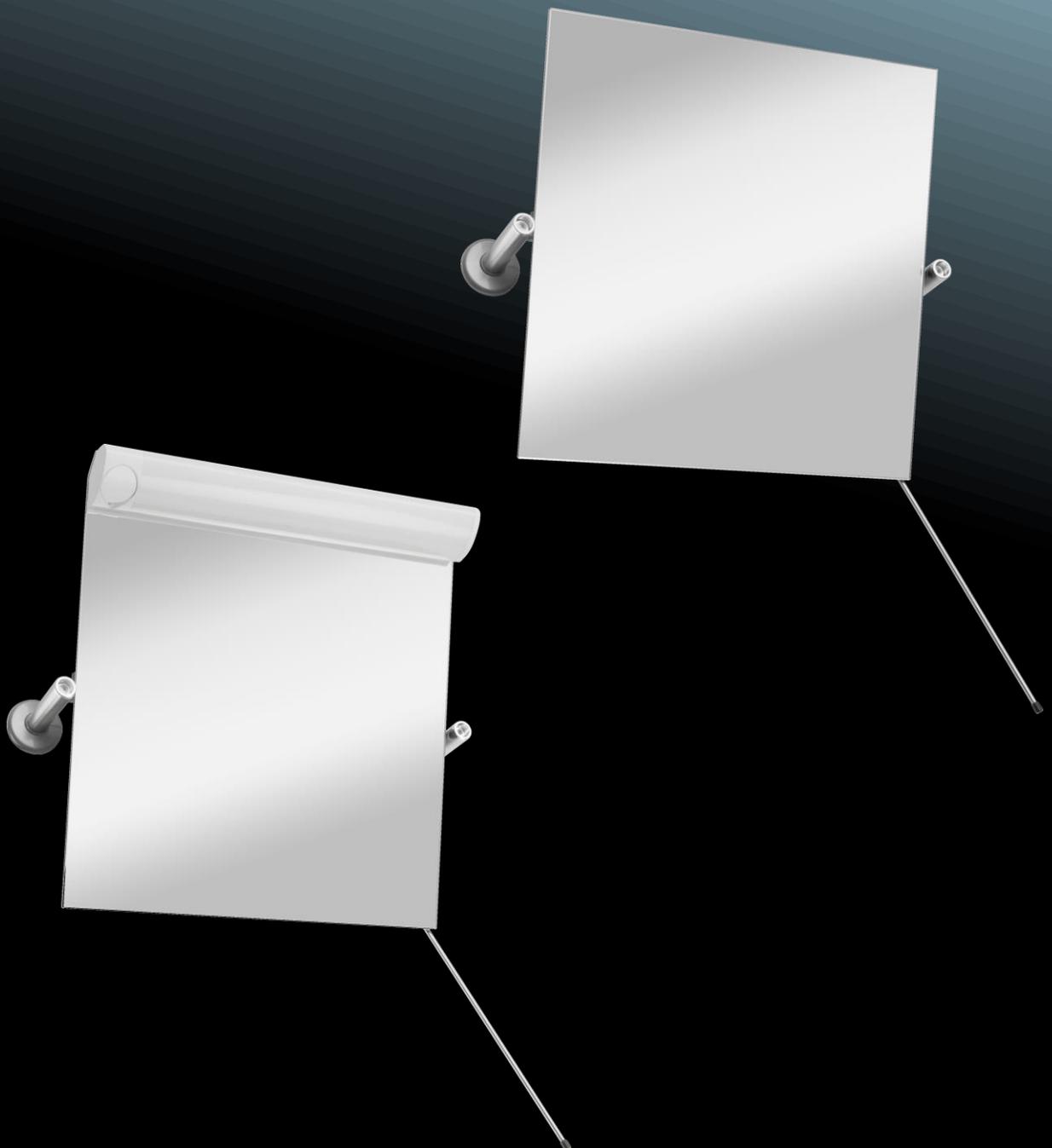

Sehr geehrte Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Rehagrip-Produkt entschieden haben.

Wir wünschen uns, dass unser Produkt Sie zu Ihrer vollsten Zufriedenheit unterstützt.

Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungs- und Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf, damit Sie bei Bedarf darin nachlesen können.

Sollten Sie diese Montage- und Gebrauchsanleitung nicht lesen können, haben Sie die Möglichkeit dieses Dokument als PDF-Datei unter www.rehagrip.at herunterzuladen oder bei unserer Service Abteilung (Adresse und Telefonnummer siehe auf der Rückseite) anzufordern.

Die PDF-Datei kann auch in vergrößerter Form dargestellt werden.

Sämtliche Artikelnummern zu den jeweiligen Produkten, finden Sie in unserer Produkt-, Preisliste und auf unserer Homepage.

Alle Bemaßungen in dieser Montage- und Gebrauchsanleitung sind in Millimeter mm angegeben.

Inhaltsverzeichnis:

Verwendungszweck	3
Warnhinweise	3
Wartung	4
Reinigungs- und Pflegehinweise	4
Transportschäden	4
Materialbeschreibung	5
Montagehinweis	6 - 10
Gesamtdimension	11

Verwendungszweck:

Unsere Kippspiegel sind vorwiegend für den Einsatz im Sanitär- und/oder WC-Bereich in Spitälern, Rehabilitationszentren, div. Heime und im privaten Bereich ausgelegt.

Je nach Bedarfssituation können die Spiegel auch in anderen Bereichen verwendet werden.

Die verlängerte Kippbetätigung ermöglicht auch Personen in einem Rollstuhl durch kippen das einfache Positionieren des Spiegels.

Warnhinweise:

Verwenden Sie den Spiegel nur wie in unserer Gebrauchsanweisung beschrieben.

Am Kippspiegel niemals Abstützen, Anhalten oder Anlehnen.

Bei Zweckentfremdung kann es zu Unfällen mit Verletzungen kommen.

Kinder dürfen den Spiegel nur in Anwesenheit eines Erwachsenen (geschultes Pflege – Betreuungspersonal) nutzen.

Den Spiegel nicht in heißen Räumen (z.B. Sauna, Dampfbad) oder im Freien montieren.

Um eine einwandfreie und sichere Benutzung der Rehagrip Kippspiegel gewährleisten zu können, darf die Montage ausschließlich vom qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden (z. B.: Sanitär-Installateure).



Warnung!

Bei nicht fachgerechter Montage, kann es bei Verwendung zu massiven Verletzungen kommen. Es wird dringend von einer Selbstmontage abgeraten!!

Bei der fachgerechten Durchführung der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dass die Flansch der BefestigungsfüÙe bündig an der Befestigungsfläche der Wand montiert werden müssen. Nicht auf z.B.: vorstehenden Fugen, Fliesenversatz oder sonstigen Unebenheiten. Weiters ist darauf zu achten, dass die Wand an der der Spiegel befestigt wird keine Schwachstellen aufweist.



Warnung!

Der Anschluss der Beleuchtung vom Kippspiegel A 171.6 darf ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr!!!

Eine Anleitung für das Anschließen der Lampe liegt dem Produkt bei.

Bei Montage den Spiegel vor Baustaub, Eisenstaub und Schmutz schützen. Bei Verletzung der metallenen Oberfläche durch Stahlwerkzeug (Hammer, Schraubendreher- Schlüssel usw.) kann es an der beschädigten Stelle zur Korrosion kommen.

Das Spiegelglas vor Schläge mit Werkzeug (Hammer, Schraubendreher- Schlüssel usw.) sowie spitzen und scharfkantigen Gegenstände schützen. Den Spiegel nicht unnötig ohne Verpackung herumliegen lassen.

Bei nicht einhalten der Warnhinweise bzw. unsachgemäÙer Handhabung und/oder mangelhafter Montage, insbesondere unter Missachtung der aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise übernimmt die Firma Christian Stögerer e.U.-Rehagrip keine Haftung für Personen- oder Sachschäden!

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Zur Reinigung reicht in der Regel einfaches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Größere Verunreinigungen können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern (keine säurehaltigen Reiniger und/oder mit Scheuermittelzusatz) entfernt werden. Zur Reinigung der Spiegeloberfläche verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger. Bei Verwendung von Reinigungsmitteln, müssen die Anwendungshinweise sowie die Gebrauchsanleitung des Herstellers befolgt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien wie z. B.: Bürsten und Scheuerlappen. Durch Nachpolieren mit einem trockenen Tuch können eventuell entstandene Wasserflecken entfernt werden. Vor der Wiederverwendung muss der gereinigte Spiegel unbedingt trocken sein und es dürfen sich keine Reinigungsmittelrückstände auf der Oberfläche befinden. Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen!

Wartung:

Die Kippspiegel sollten zumindest einmal im Quartal überprüft werden. Zu überprüfen sind die Befestigungen, die Funktion der Kippmechanik, das Spiegelglas auf Risse und scharfe abgeschlagene Kanten und die elektrischen Anschlüsse der Beleuchtung (falls vorhanden).



Die Überprüfung und Behebung von eventuellen Beanstandungen dürfen ausschließlich vom dafür qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden. Um die Möglichkeit einer Verletzung zu vermeiden, führen Sie die Überprüfung auf keinen Fall selbst durch! Bei unsachgemäßer bzw. nicht durchgeführter Kontrolle übernimmt die Firma Christian Stögerer e.U.-Rehagrip keine Haftung für Personen- oder Sachschäden!

Kunststoffteile (div. Abdeckungen), bewegliche Teile (Gelenke) und Montagematerial sind Verschleißteile und können Sie unter www.rehagrip.at oder bei unserer Service-Abteilung (Adresse und Telefonnummer siehe auf der Rückseite) als Ersatzteil erwerben.

Entsorgung:

Entsorgen Sie das Produkt und das Verpackungsmaterial nicht über den Hausmüll. Bringen Sie es zu den von örtlichen Behörden zugewiesenen Sammelstellen.



Transportschäden:

Das von uns produzierte Produkt hat unser Werk in einem einwandfreien Zustand verlassen.

Um eventuelle spätere schwerwiegende Funktionsbeeinträchtigungen und die daraus resultierenden Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, muss bei Annahme das Produkt auf offensichtliche, leicht erkennbare Mängel geprüft werden. Eine Reklamation kann nur innerhalb von 3 Tagen ab Warenerhalt erfolgen. Bei versteckten Mängeln innerhalb von 3 Wochen. Die Ware darf nur trocken und druckfrei gelagert werden.

Materialbeschreibung:

Unsere Produkte werden aus **Edelstahl- Werkstoff 1.4301** (Kurzbezeichnung: X5CrNi1810, Legierungsbestandteile: 18% Chrom, 10% Nickel) gefertigt.

Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und Desinfektionsmittelbeständig.



Div. Kunststoffteile wie z.B. Abdeckrosetten und Abdeckkappen werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis -40°C über eine sehr gute Zähigkeit.

Die Spiegel sind auf Wunsch in div. Farben pulverbeschichtet erhältlich.







Die Pulverbeschichtung ist ein umweltfreundliches Beschichtungsverfahren, da es frei von Schwermetallen und Lösungsmittel ist.

Die Beschichtung zeichnet sich durch eine unübertroffene Farbbeständigkeit und Glanzerhaltung, sowie eine hohe chemische Beständigkeit aus. Durch die relativ hohen Schichtdicken wird eine sehr gute Festigkeit gegenüber mechanischen Belastungen erreicht.



Farbkarte:



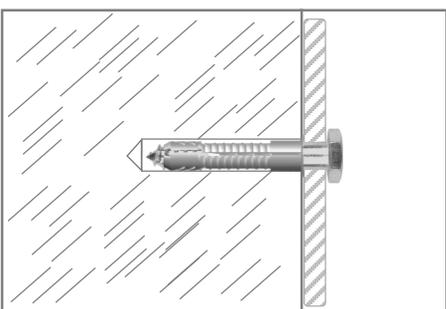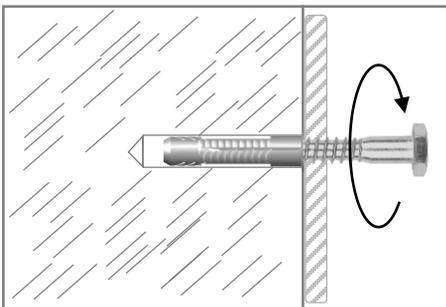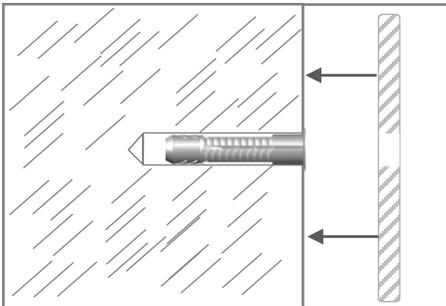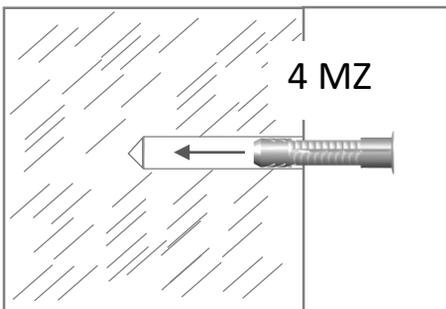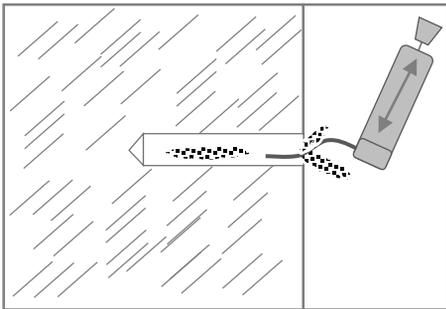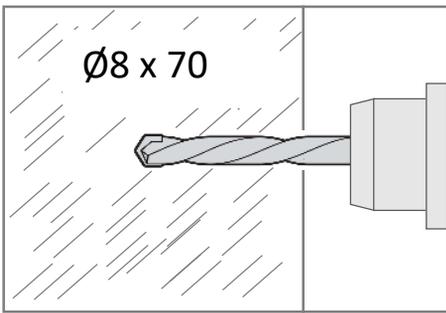

Montagehinweis:




Zur Befestigung der Griffe an massiven Wänden wird das Standard- Befestigungsmaterial mitgeliefert, es besteht aus:

Mehrzweckdübel 4 MZ 8 x 49 und




Sechskant-Holzschrauben A2 6 x 70 DIN 571

Geeignet zur Befestigung an folgenden Wandtypen:
Beton B 25, Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel M 20, Kalksandvollstein KS 12, Vollstein-Leichtbeton V4


Bei Wandtypen die in dieser Erläuterung nicht angeführt sind, muss eine Fachfirma für Befestigungstechnik hinzugezogen werden.

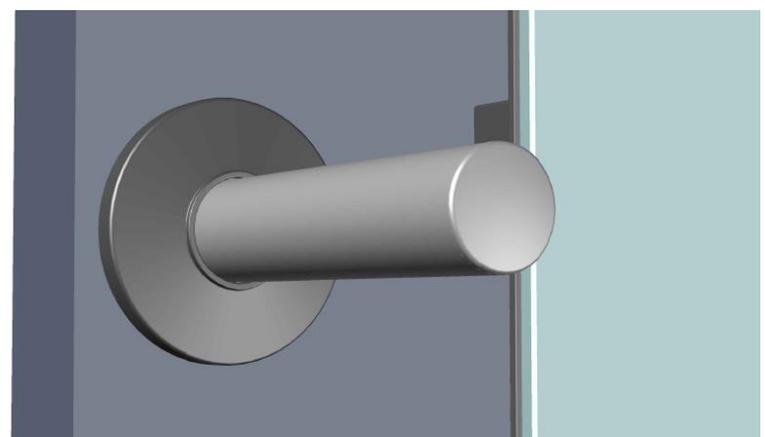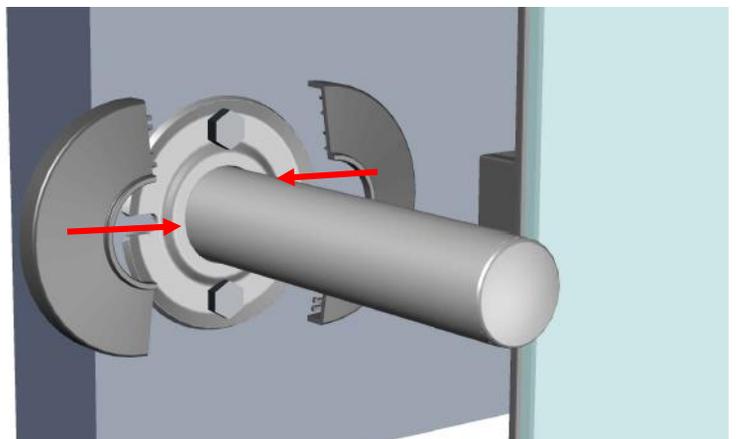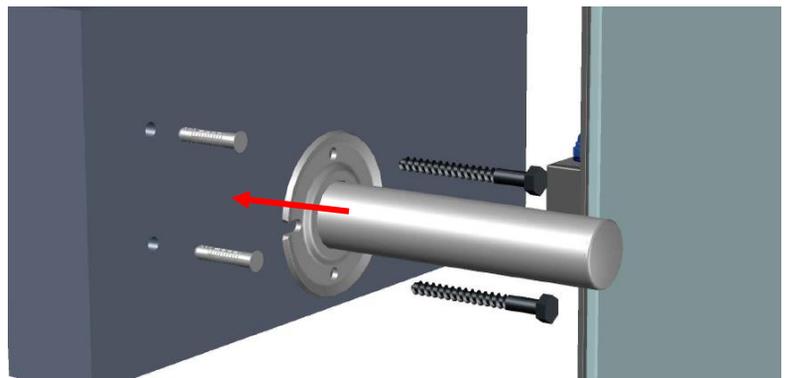



Montagehinweis:
Bohrlochgeometrie:

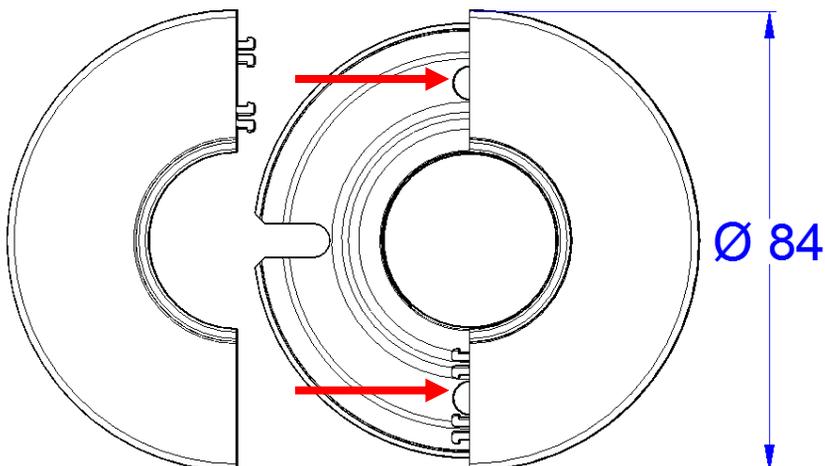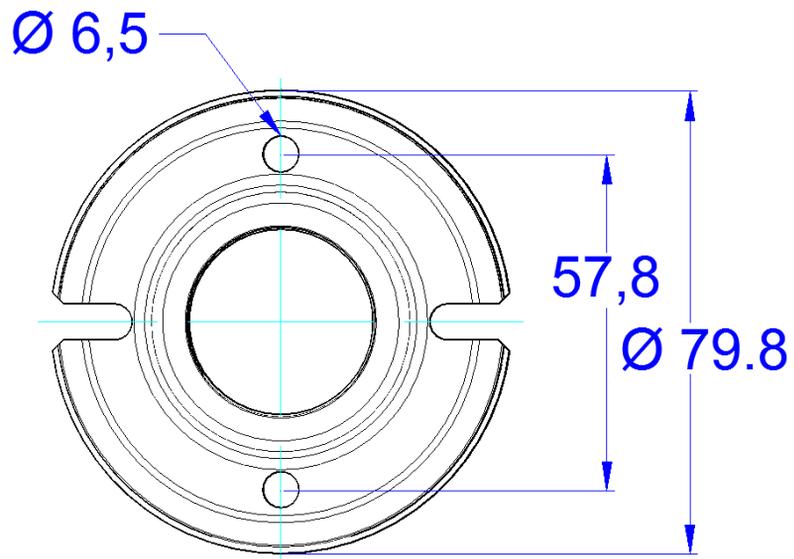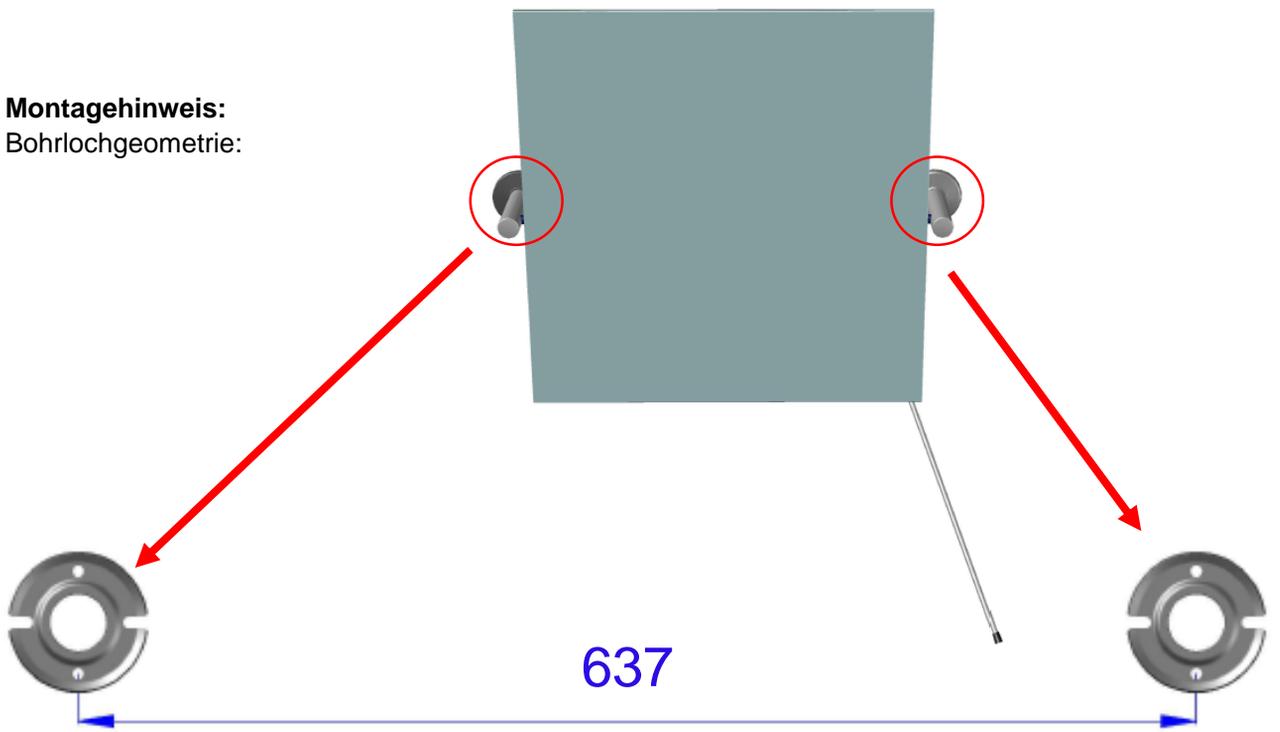

Montagehinweis


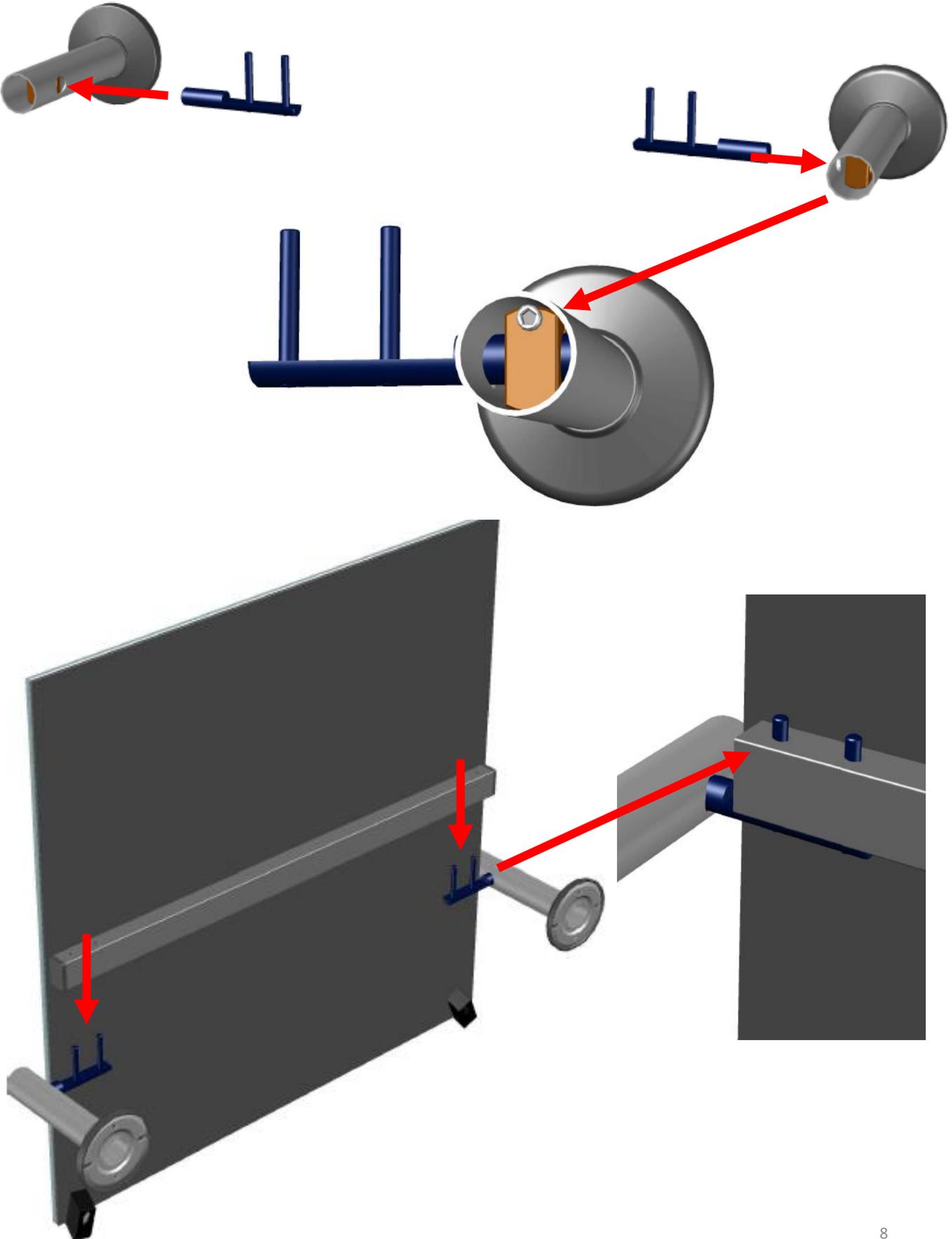


Montagehinweis

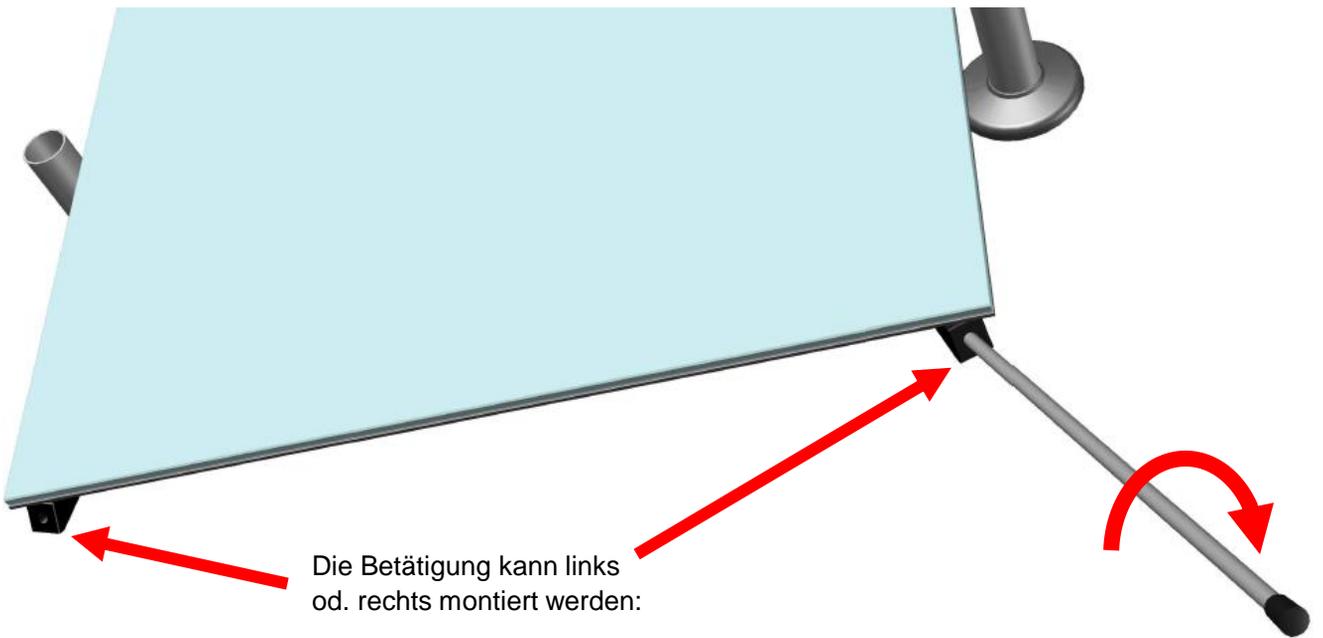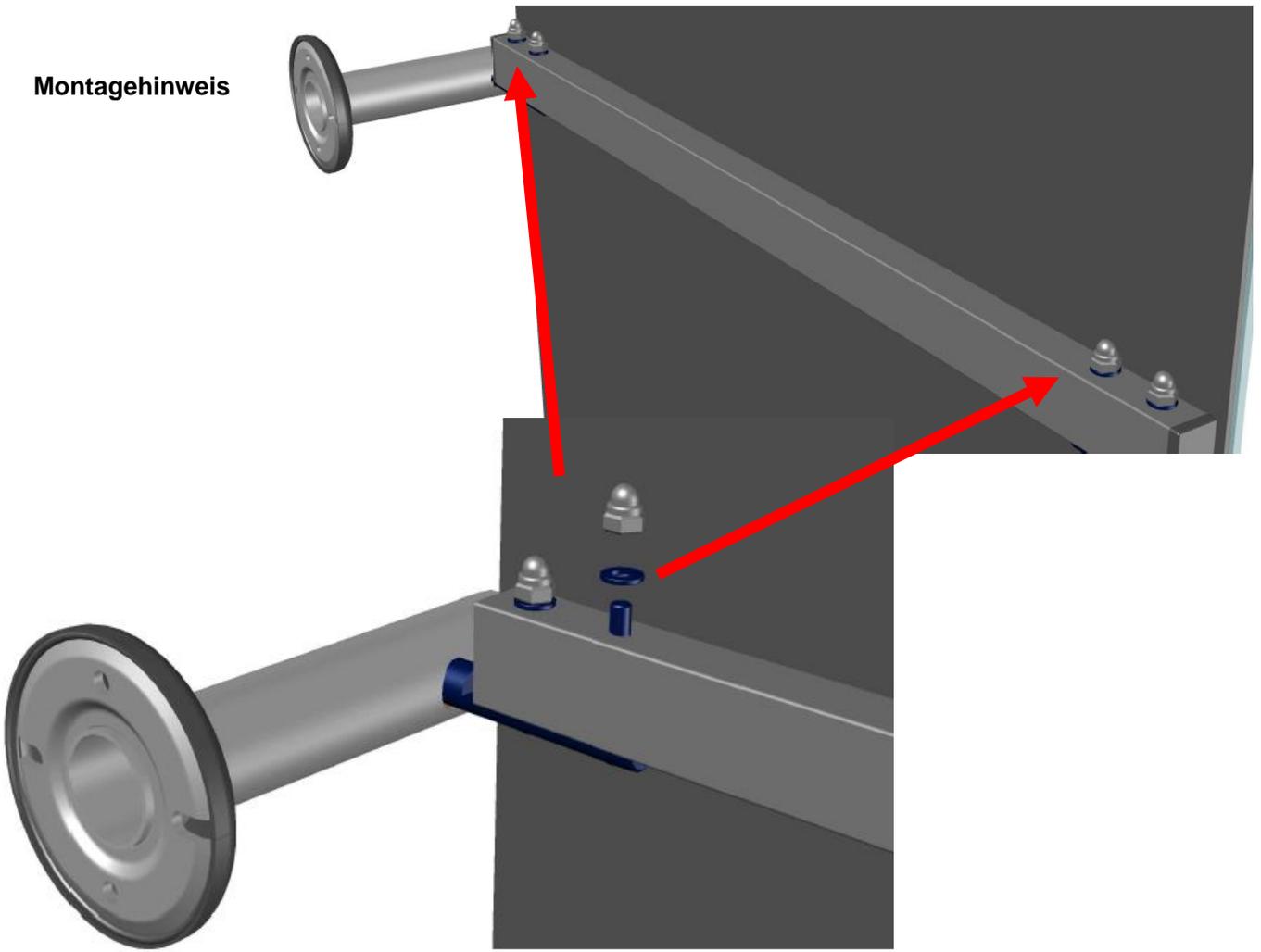



Die Betätigung kann links
od. rechts montiert werden:

Montagehinweis:

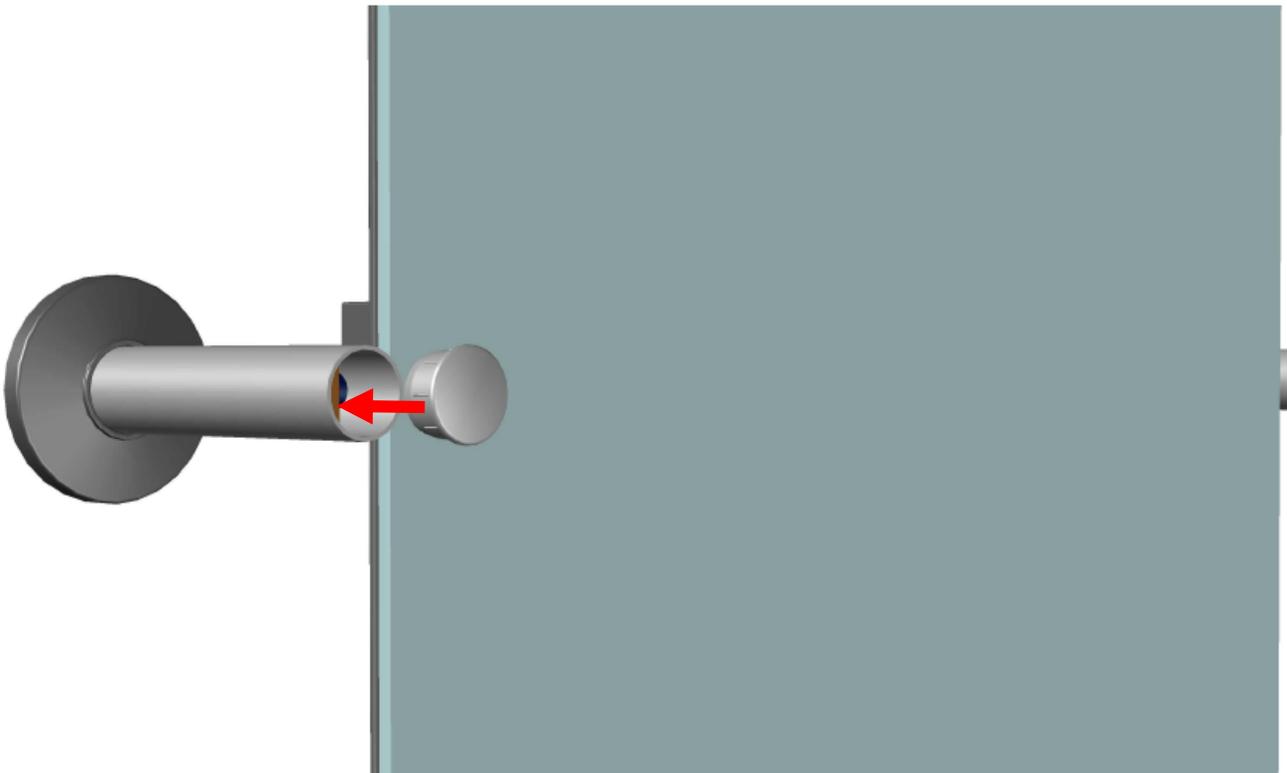
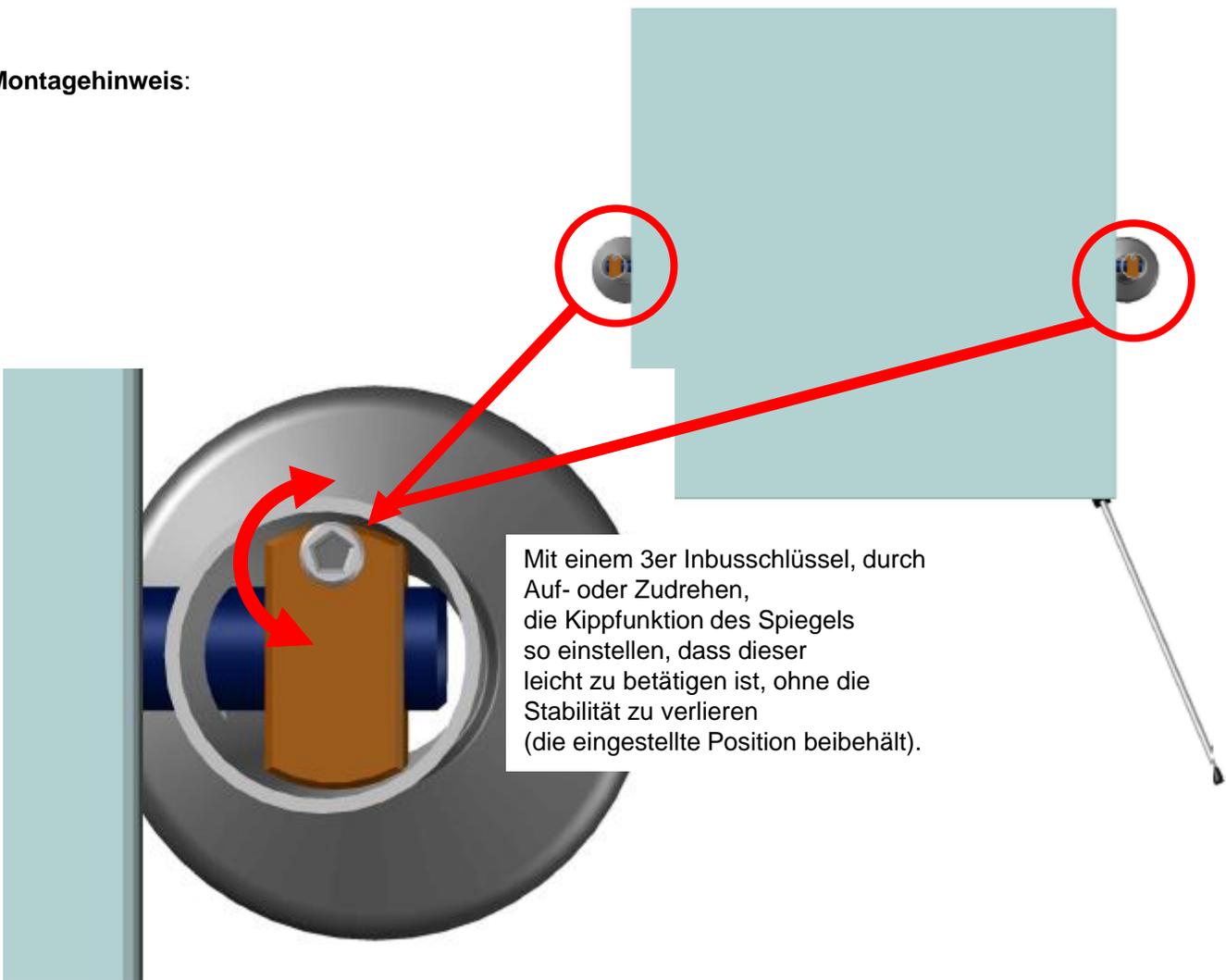


Gesamtdimensionen:

Kippspiegel A 171.4 ohne Beleuchtung:

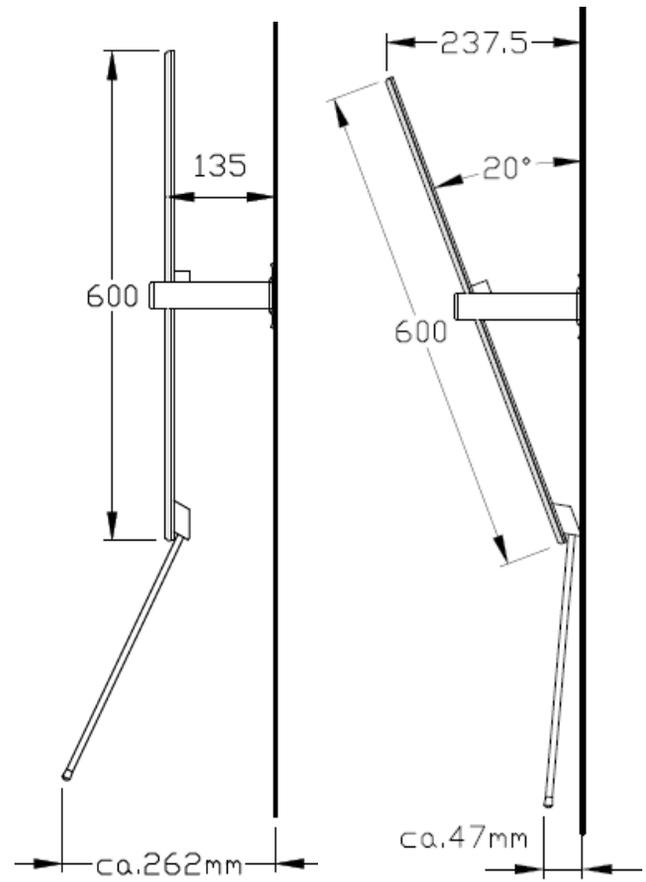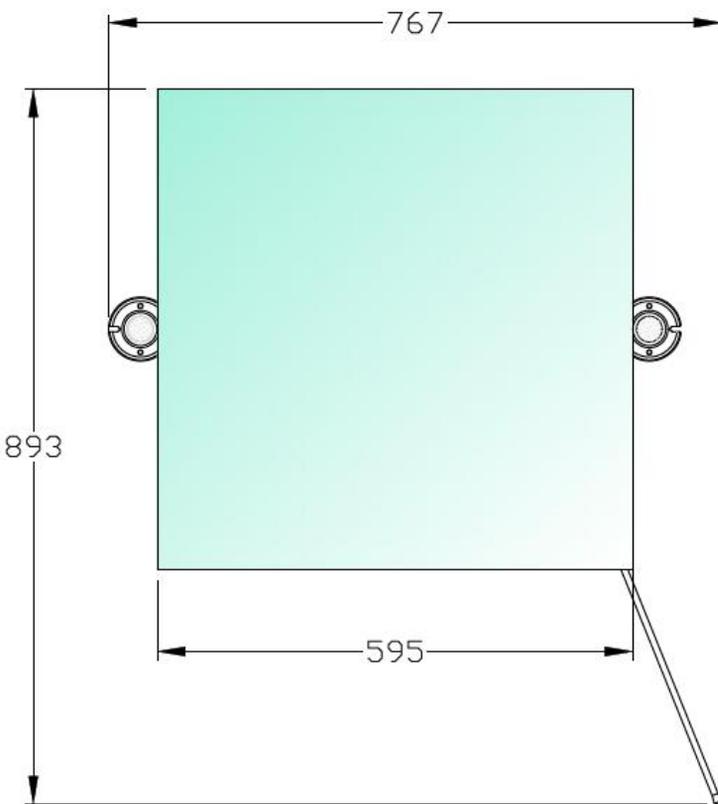

Kippspiegel A 171.6 mit Beleuchtung:

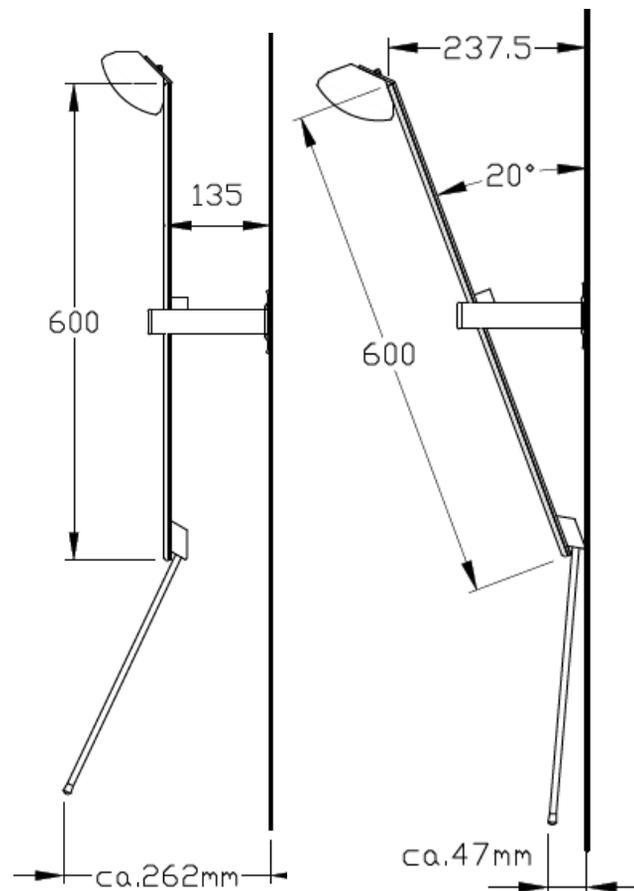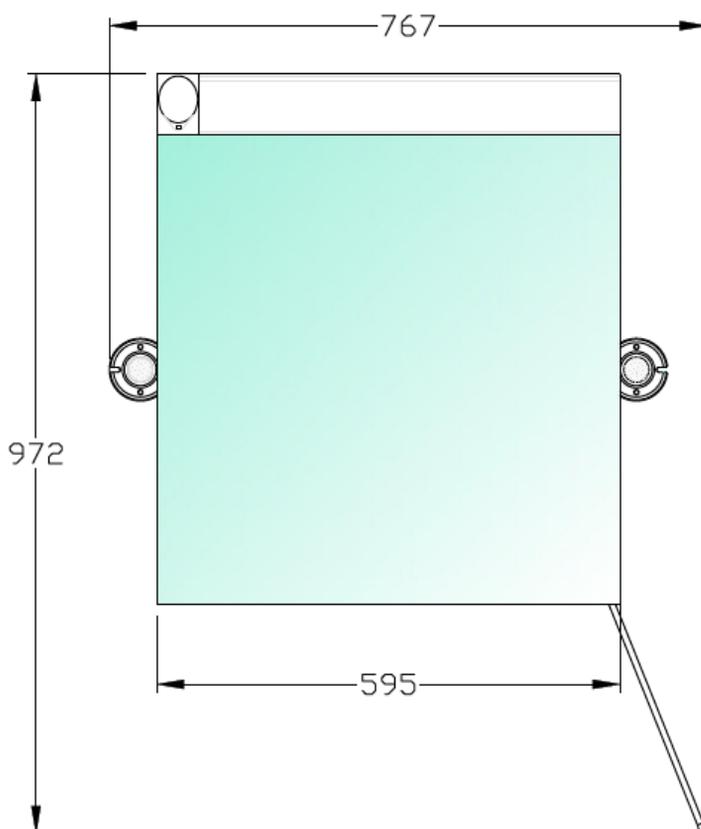



rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung muss vom Monteur an den Benutzer weitergegeben und für die Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden.

Pflege- und Betreuungspersonal ist verpflichtet die Benutzer unserer Produkte laut dieser Information zu Unterweisen.

Auf diese und weitere Informationen, können Sie auch auf unserer Homepage www.rehagrip.at zugreifen.



Christian Stögerer e.U.
Gaudenzdorfer Gürtel 73a
1120 Wien

Tel. (+43) 1-810 57 40
Fax (+43) 1-810 57 40 – 28
E-Mail office@rehagrip.at