



rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Duschklapsitz

A 153.0 für Wandmontage

A 154.0 zum Ein – und Aushängen

A 74.0 seitlich verschiebbar



Serviceanleitung

Tausch der Gasdruckfeder (Airmatic) der Sitze des Typs A 74.0, A 153.0/4, und A154.0/4:

1.

Sitzfläche hochklappen.

2.


Regenhütchen entfernen.

3.

Sicherungsring (silber)
der Feder entfernen.


4.

Sicherungsring (orange)
des Stiftes (grün) entfernen.

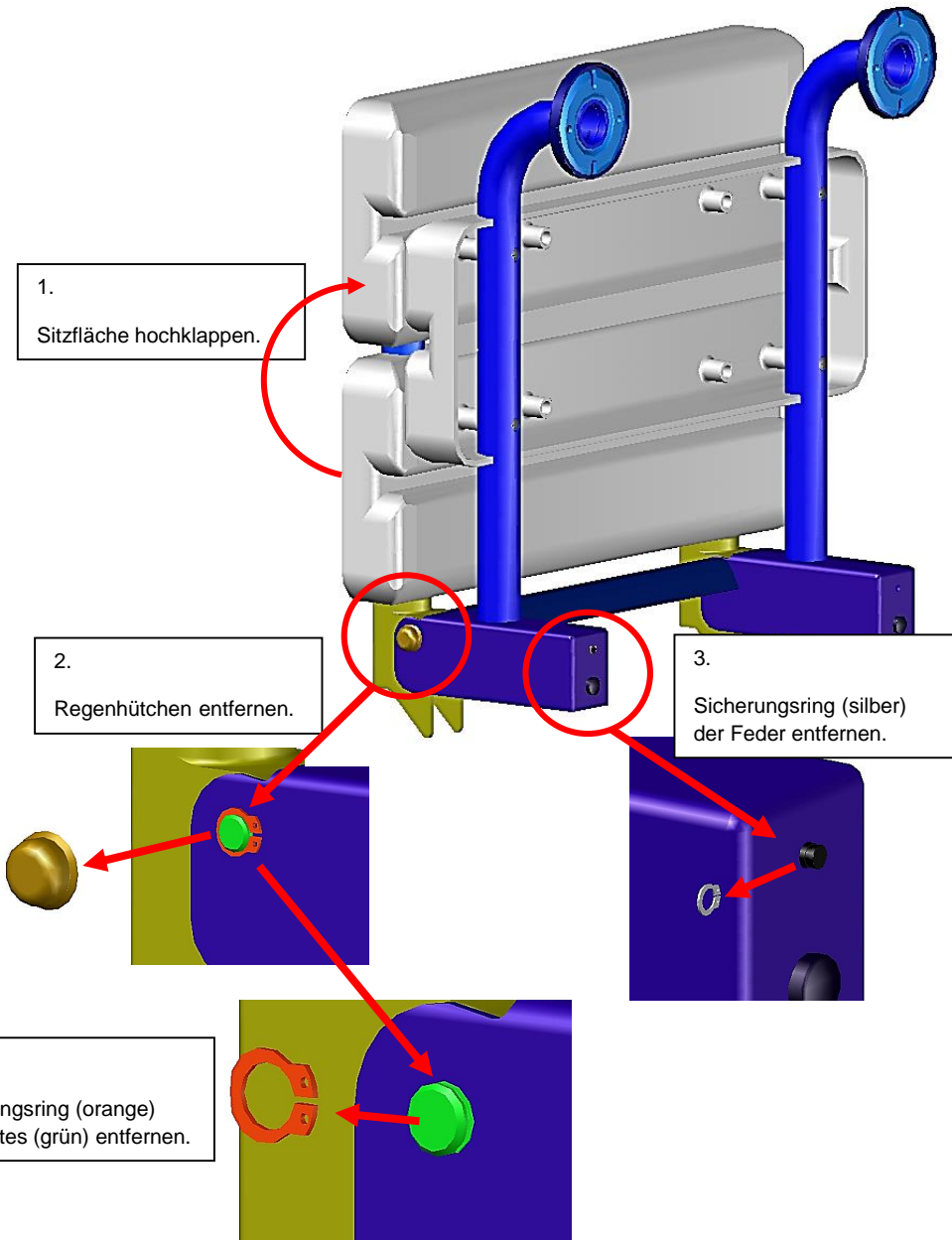


5.


Stift (grün) mit einem Durchschlag und Hammer vorsichtig herausschlagen.

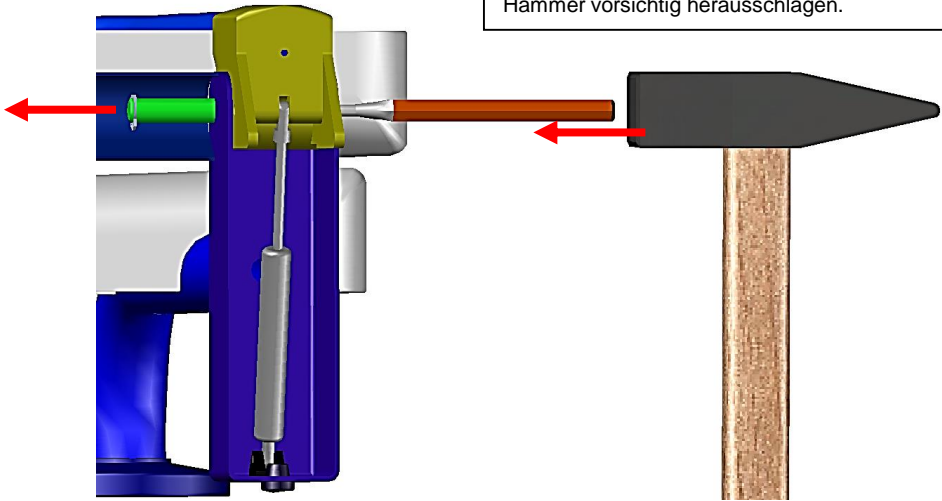

6.


Die Sitzfläche leicht verdrehen bis der Spannstift (orange) zu sehen ist .

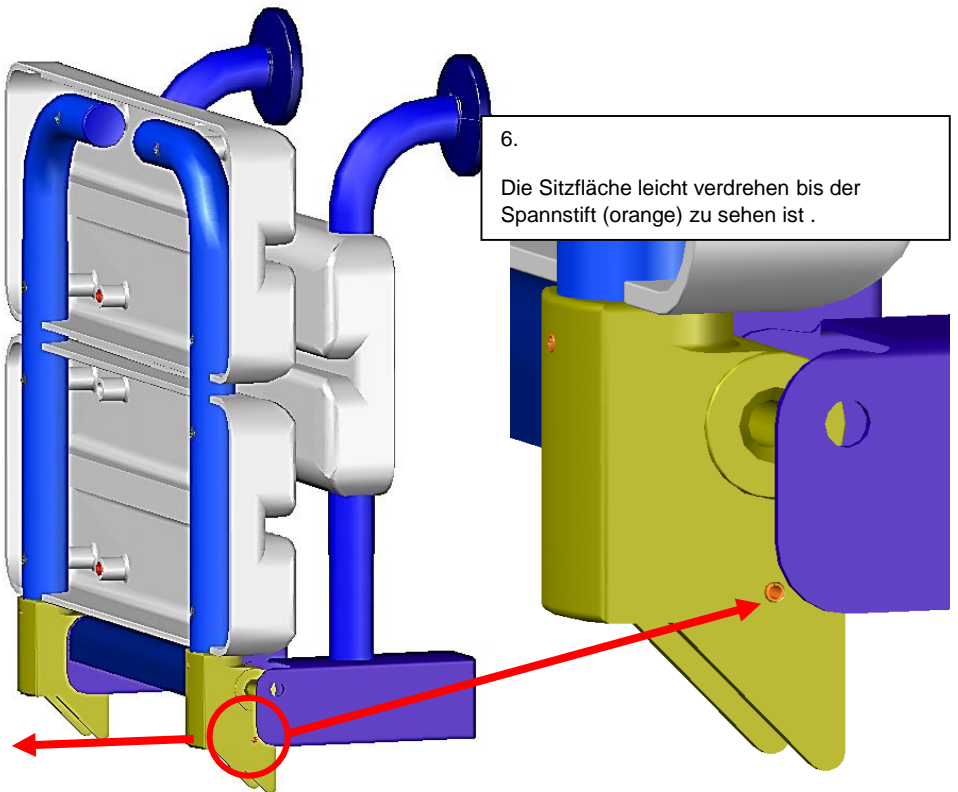

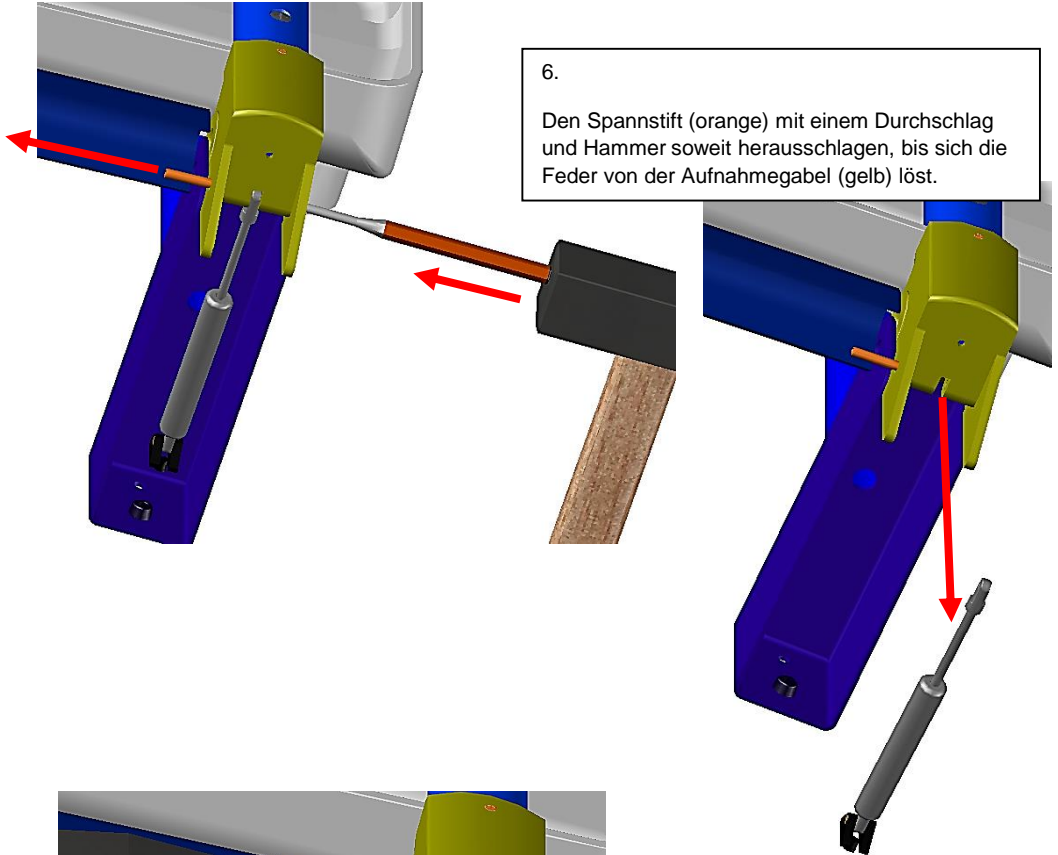


6.

Den Spannstift (orange) mit einem Durchschlag und Hammer soweit heraus schlagen, bis sich die Feder von der Aufnahmegabel (gelb) löst.

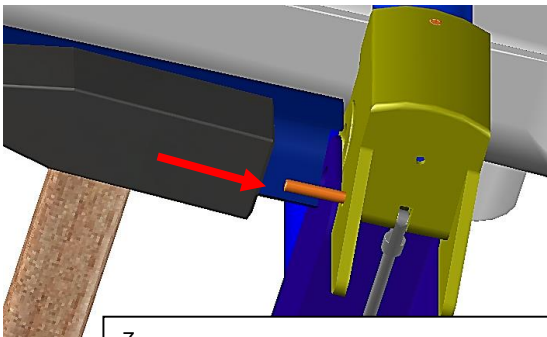



7.

Die neue Feder einsetzen und den Spannstift (orange) mit einem Hammer hineinschlagen

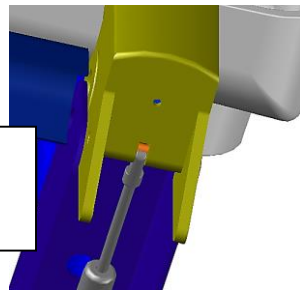

8.

In umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.

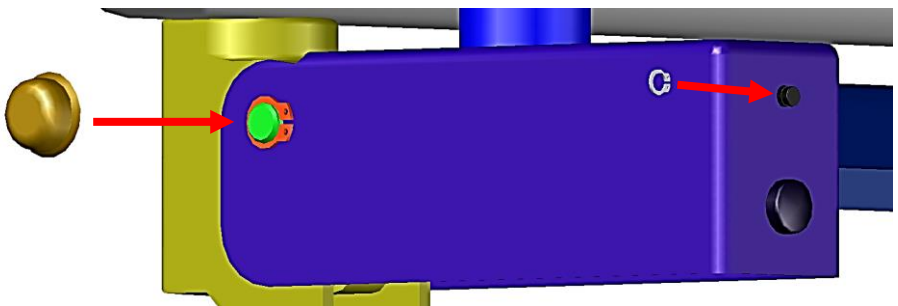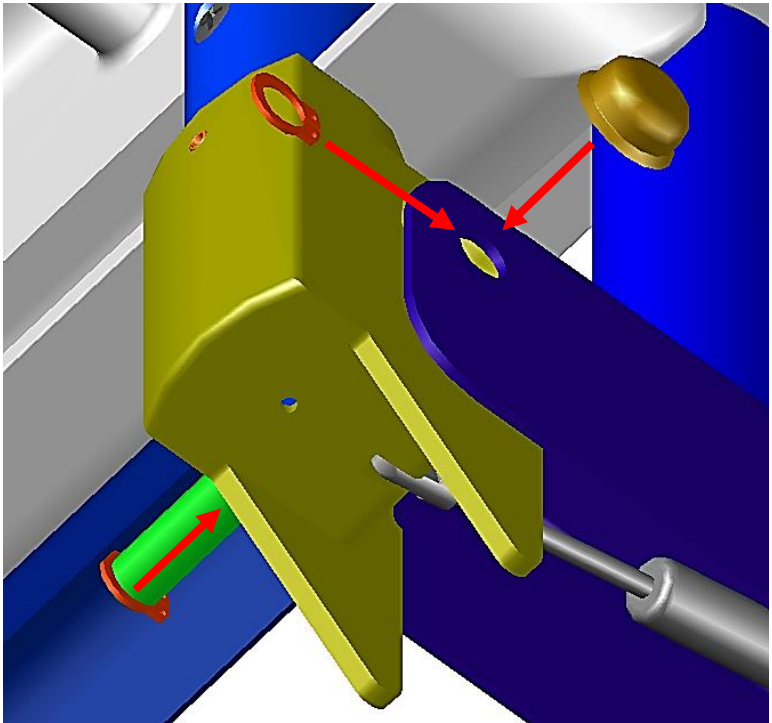

!!Achtung!!

- Die Gasdruckfedern dürfen bei Ihrer Funktion keinen Verkantungen und Seitenkräften ausgesetzt sein.
- Beim Austausch der Feder, ist diese vor Schlägeinwirkungen, Kratzern und Verschmutzungen zu schützen. Das Zylinderrohr darf nicht deformiert werden.
- Die Gasdruckfedern haben einen sehr hohen Innendruck, daher ist ein unsachgemäßes Öffnen des Produktes nicht erlaubt.
- Die Gasdruckfedern dürfen nicht mit chemischen Mitteln gesäubert werden.



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Auf diese und weitere Informationen, können Sie auch auf unserer Homepage www.rehagrip.at zugreifen.



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Christian Stögerer e.U.
Gaudenzdorfer Gürtel 73a
1120 Wien

Tel. (+43) 1-810 57 40
Fax (+43) 1-810 57 40-28
E-Mail office@rehagrip.at