



rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Montage- und Gebrauchsanleitung für:

Stützklappgriffe A/B und E-Serie

Wand-Stützgriffe Bügelform A/B und E-Serie



Sehr geehrte Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Rehagrip-Produkt entschieden haben.

Wir wünschen uns, dass unser Produkt Sie zu Ihrer vollsten Zufriedenheit unterstützt.

Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungs- und Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf, damit Sie bei Bedarf darin nachlesen können.

Sollten Sie diese Montage- und Gebrauchsanleitung nicht lesen können, haben Sie die Möglichkeit dieses Dokument als PDF-Datei unter www.rehagrip.at herunterzuladen oder bei unserer Service Abteilung (Adresse und Telefonnummer siehe auf der Rückseite) anzufordern.

Die PDF-Datei kann auch in vergrößerter Form dargestellt werden.

Sämtliche Artikelnummern zu den jeweiligen Produkten, finden Sie in unserer Produkt-, Preisliste und auf unserer Homepage.

Alle Bemaßungen in dieser Montage- und Gebrauchsanleitung sind in Millimeter mm angegeben.

Inhaltsverzeichnis:

Verwendungszweck	3
Warnhinweise	3 - 4
Wartung	4 - 5
Transportschäden	5
Reinigungs- und Pflegehinweise	5
Materialbeschreibung	6
Montagehinweise / Montagebeispiel	7 - 13
Zubehör	13 - 14
Gesamtdimension	15 - 17
Masse der Griffe	18

Dieses Medizinprodukt ist konform der Richtlinie 93/42/EWG.

Verwendungszweck:

Unsere Stützklapp- und Wandstützgriffe sind für den Einsatz in Nasszellen, Badezimmer, Pflegebäder, Duschräume und WC's im Klinik-, Pflege-, und Privatbereich ausgelegt. Je nach Bedarfssituation können diese Griffe auch in anderen Bereichen verwendet werden.

Vorwiegend werden diese beidseitig bei Waschtischen und Toiletten angeordnet. Sie bieten Halte- und Stützmöglichkeiten, verhindern das unbeabsichtigte Wegkippen z.B. von der Toilette und erleichtern das Aufstehen bzw. Setzen von Erwachsenen und Kindern mit körperlichen Einschränkungen, mit Schäden am Bewegungsapparat, Bein-, oder Armprothetik und /oder motorischen Einschränkungen. Ist ein Stützklapp- oder Wandstützgriff mit einem integrierten Papierrollenhalter ausgestattet, ermöglicht dieser eine bequeme Entnahme mit einer Hand und ist links-, rechts- oder beidseitig anzuordnen.

Warnhinweise:

Die Rehagrip Stützklappgriffe und Wandstützgriffe sind für eine maximale Belastung von bis zu 150 kg (für Personen mit max. 150 kg geeignet) ausgelegt. Die max. Belastung ist auch auf dem Aufkleber an den Griffen ersichtlich.



Beim Überschreiten der Belastungswerte können dauerhafte Schäden am Griff oder/und am Gelenk des Griffes auftreten. Eine geringe Durchbiegung unter Belastung ist unbedenklich. Sollte der Griff nach Entlastung nicht in den Ursprungszustand zurückkehren (dauerhafte Verbiegung), darf dieser nicht mehr benützt werden. In diesem Fall muss der Griff unverzüglich von einem dafür qualifizierten Fachpersonal oder Wartungsunternehmen untersucht werden.

Verwenden Sie die Griffe nur wie in unserer Gebrauchsanweisung beschrieben.

Bei Zweckentfremdung, z. B.: als Steighilfe oder Turngerät kann es zu Unfällen mit Verletzungen kommen.






Die Griffe dürfen nur in Anwesenheit eines geschulten Pflege – Betreuungspersonal genutzt werden. Bei Benutzung durch Kinder und auch Erwachsenen ist darauf zu achten, dass diese nicht mit den Kopf zwischen das Ober- und das Unterrohr der Griffe geraten.

Es besteht Strangulationsgefahr.

Beim Herunterklappen der Klappgriffe ist darauf zu achten, dass sich keine Personen (insbesondere Kinder) unter dem Griff befinden. Bei Missachtung kann es zu Unfällen mit gravierenden Verletzungen kommen.

Weiters kann es zu Quetschungen kommen.

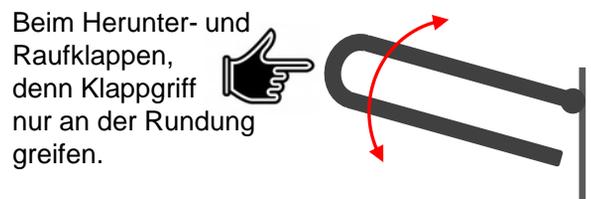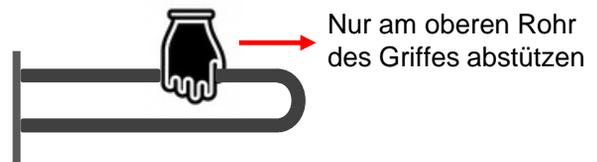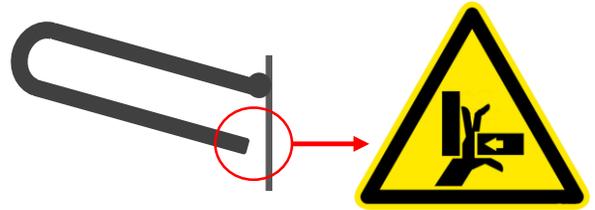

Um eine einwandfreie und sichere Funktion der Rehagrip Stützklapp- und Wandstützgriffe gewährleisten zu können, darf die Montage ausschließlich von qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden (z. B.: Sanitär-Installateure). Bei nicht fachgerechter Montage, kann es durch Funktionsbeeinträchtigungen des Griffes zu Unfällen mit massiven Verletzungen kommen. Es wird dringend von einer Selbstmontage abgeraten!!

Ist ein Griff mit einer Fernauslösung ausgestattet, muss die elektrische Installation von einem konzessionierten Elektriker durchgeführt werden.

Bei der fachgerechten Durchführung der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dass der Griff bündig an der Befestigungsfläche der Wand montiert werden muss. Nicht auf z.B.: vorstehenden Fugen, Fliesenversatz oder sonstigen Unebenheiten. Weiters ist darauf zu achten, dass die Wand an der der Griff befestigt wird keine Schwachstellen aufweist. Nach der Montage muss eine Funktionsprüfung am Griff durchgeführt werden.




Warnhinweise:




Achtung!

Bei Montage in heißen Räumen (z.B. Sauna, Dampfbad) oder bei direkter Sonneneinstrahlung, können die Griffe eine Oberflächentemperatur von über 41°C erreichen.

Es besteht Verbrennungsgefahr.

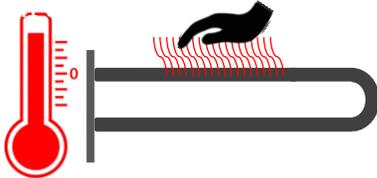

Im Freien oder in Räumen mit Umgebungstemperatur unter 0°C kann es zu Vereisungen der Griffoberfläche kommen. Ein sicherer Halt ist dann nicht mehr gegeben.

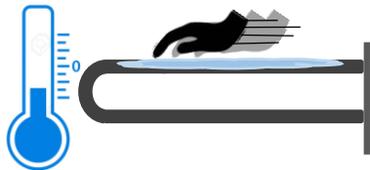

Klappgriffe mit Airmatic dürfen bei einer Umgebungstemperatur von unter -20°C über +80°C nicht verwendet werden, da es sonst zu Schäden an der Gasdruckfeder kommen kann.

Bei Montage die Oberfläche der Griffe vor Baustaub, Eisenstaub und Schmutz schützen. Griff nicht unnötig ohne Verpackung herumliegen lassen. Bei Verletzung der Oberfläche durch Stahlwerkzeug (Hammer, Schraubendreher- Schlüssel usw.) kann es an der beschädigten Stelle zur Korrosion kommen.



Warnung!

Bei Griffen mit Fernauslösung, dürfen Anschlussarbeiten ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr!!! Technische Angaben zur Montage der Fernauslösung an der Spülung – entnehmen Sie bitte der Montageanleitung vom Hersteller der Spülung bzw. Steuerung oder Magnetventil.

Bei Einhaltung sämtlicher Hinweise wird eine 13-jährige Lebensdauer der Griffe garantiert. Ausgenommen sind Kunststoffteile (div. Abdeckungen), Gasdruckfedern bei Griffen mit Airmatic, Schrauben und Bolzen an den Gelenken und Montagematerial. Diese Verschleißteile können Sie unter www.rehagrip.at oder bei unserer Service-Abteilung (Adresse und Telefonnummer siehe auf der Rückseite) als Ersatzteil erwerben.

Bei nicht einhalten der Warnhinweise bzw. unsachgemäßer Handhabung und/oder mangelhafter Montage, insbesondere unter Missachtung der aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise übernimmt die Firma Christian Stögerer e.U.-Rehagrip keine Haftung für Personen- oder Sachschäden!

Wartung:

Sämtliche Rehagrip Stützklappgriffe und Wandstützgriffe sind nicht wartungsfrei! Die Griffe sollten zumindest einmal im Quartal ausschließlich vom dafür qualifizierten Fachpersonal auf einwandfreie Funktion der beweglichen Teile, sowie Festigkeit aller Schrauben und Muttern überprüft werden.

Bei der Wartung muss überprüft werden, ob der Griff langsam und gleichmäßig herunterklappt und dieser in senkrechter Position verbleibt. Gegebenenfalls muss die Mutter am Gelenk nachgezogen werden, auf keinen Fall darf das Gelenk gefettet oder geschmiert werden.

Wartung:

Bei Griffen mit Airmatic, muss die Gasdruckfeder ausgetauscht werden.

- Die Gasdruckfeder darf bei Ihrer Funktion keinen Verkantungen und Seitenkräften ausgesetzt sein.
- Beim Austausch der Feder, ist diese vor Schlageinwirkungen, Kratzern und Verschmutzungen zu schützen. Das Zylinderrohr darf nicht deformiert werden.
- Die Gasdruckfeder hat einen sehr hohen Innendruck, daher ist ein unsachgemäßes Öffnen des Produktes nicht erlaubt.
- Die Gasdruckfedern dürfen nicht mit chemischen Mitteln gesäubert werden.
- Die Gasdruckfedern sind mit Öl gefüllt. Die getauschten Federn nur über den Rohstoffhandel oder einer Sondermüllsammelstelle entsorgen. Die Feder und / oder die Teile dieser nicht in den Hausmüll geben, das Öl darf nicht ins Erdreich oder in Gewässer gelangen.

Wird ein Griff mit einem Funksender ausgestattet, ist die dem Sender beigelegte Montage- und Bedienungsanleitung zu beachten.

Der Sender wird mit 2 Alkalibatterien LR-1 betrieben. Verbrauchte Batterien sofort aus dem Sender entfernen. Werfen Sie die Batterien niemals in den Hausmüll oder in Gewässer. Geben Sie die verbrauchten Batterien in einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Entsorgen Sie das Produkt und das Verpackungsmaterial nicht über den Hausmüll.

Bringen Sie es zu den von örtlichen Behörden zugewiesenen Sammelstellen.



Um eine Beeinträchtigung der Funktion und die dadurch resultierende Möglichkeit einer Verletzung zu vermeiden, führen Sie die Wartung auf keinen Fall selbst durch!

Bei unsachgemäßer bzw. nicht durchgeführter Wartung übernimmt die Firma Christian Stögerer e.U.-Rehagrip keine Haftung für Personen- oder Sachschäden!

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Zur Reinigung reicht in der Regel einfaches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Größere Verunreinigungen können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern (keine säurehaltigen Reiniger und/oder mit Scheuermittelzusatz) entfernt werden. Bei Verwendung von Reinigungsmitteln, müssen die Anwendungshinweise sowie die Gebrauchsanleitung des Herstellers befolgt werden.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien wie z. B.: Bürsten und Scheuerlappen.

Je nach Bedarf, kann auch Desinfektionsmittel mit bis zu 98% Alkoholanteil verwendet werden.

Durch Nachpolieren mit einem trockenen Tuch können eventuell entstandene Wasserflecken entfernt werden.


Bei Griffen mit Airmatic ist zu beachten, dass die Gasdruckfeder nicht mit chemischen Mitteln gesäubert werden darf.

Vor der Wiederverwendung muss der gereinigte Griff unbedingt trocken sein (Abrutscht Gefahr!) und es dürfen sich keine Reinigungsmittelrückstände auf der Oberfläche befinden.

Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen!

Hinweise des Aufklebers am Griff:


Der Aufkleber befindet sich auf der Grundplatte der Griffe.

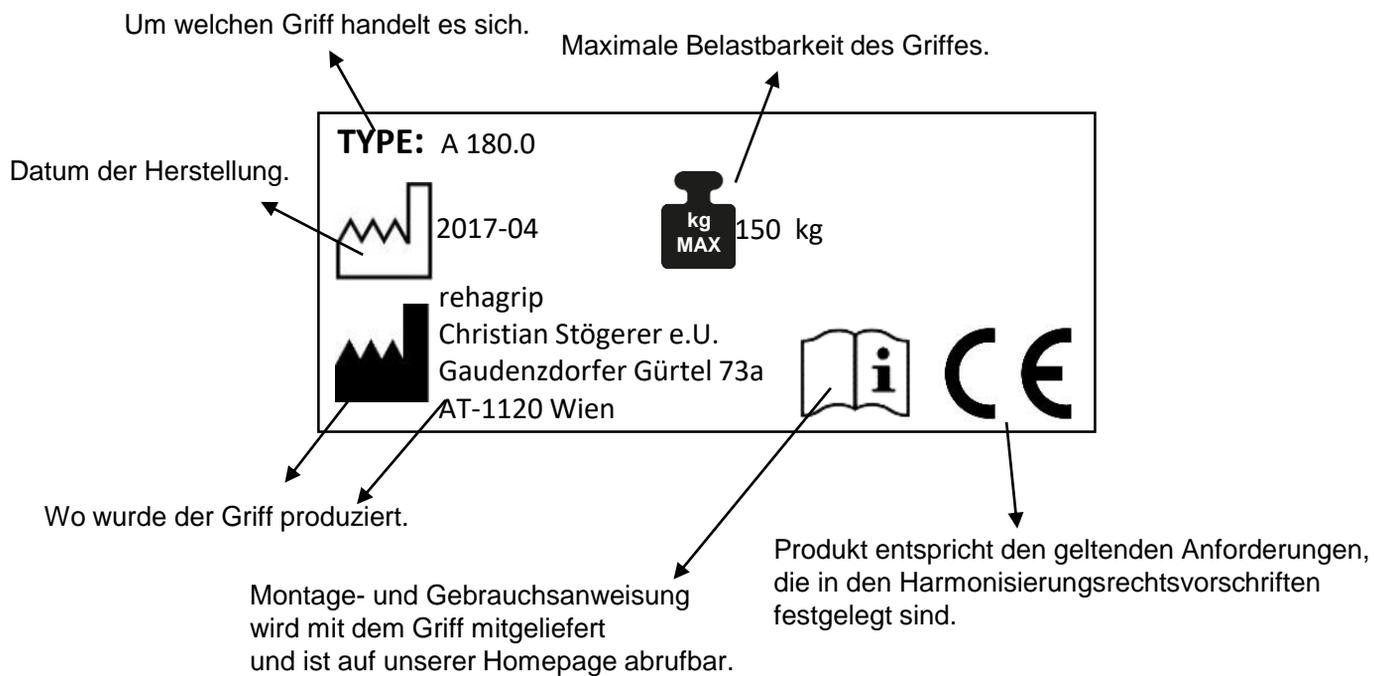

Materialbeschreibung:

Unsere Produkte werden aus **Edelstahl- Werkstoff 1.4301** (Kurzbezeichnung: X5CrNi1810, Legierungsbestandteile: 18% Chrom, 10% Nickel) gefertigt.

Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und Desinfektionsmittelbeständig.

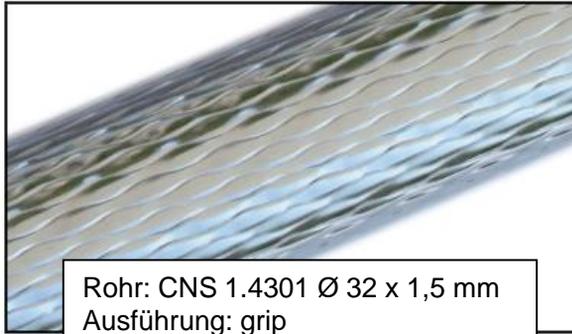

Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm
Ausführung: grip
Profiltiefe: 0,15 mm – 0,20 mm
Oberfläche: elektropoliert



Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm
Ausführung: glatt
Oberfläche: glatt poliert und elektropoliert


Div. Kunststoffteile wie z.B. Kugelstopfen und Abdeckkappen werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis -40°C über eine sehr gute Zähigkeit.

Alle Griffe sind auf Wunsch in div. Farben pulverbeschichtet erhältlich.

Die Pulverbeschichtung ist ein umweltfreundliches Beschichtungsverfahren, da es frei von Schwermetallen und Lösungsmittel ist.

Die Beschichtung zeichnet sich durch eine unübertroffene Farbbeständigkeit und Glanzerhaltung, sowie eine hohe chemische Beständigkeit aus. Durch die relativ hohen Schichtdicken wird eine sehr gute Festigkeit gegenüber mechanischen Belastungen erreicht.

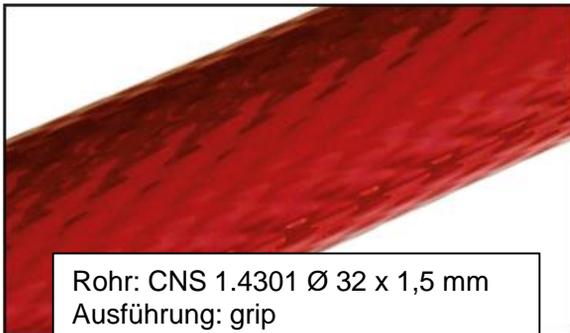

Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm
Ausführung: grip
Profiltiefe: 0,15 mm – 0,20 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet






Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm
Ausführung: glatt
Oberfläche: pulverbeschichtet







Farbkarte:



Montagebeispiel:

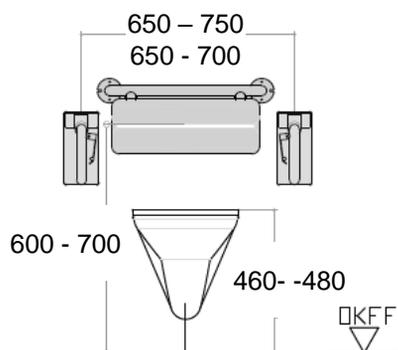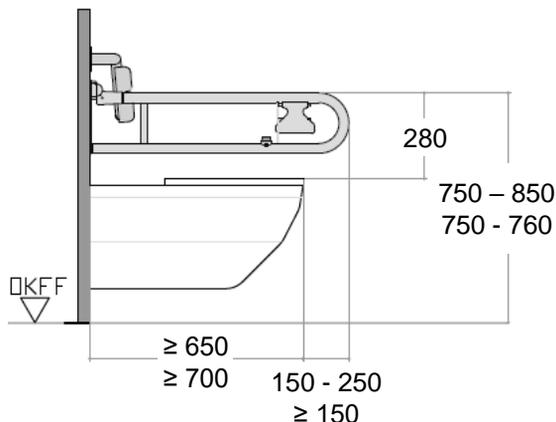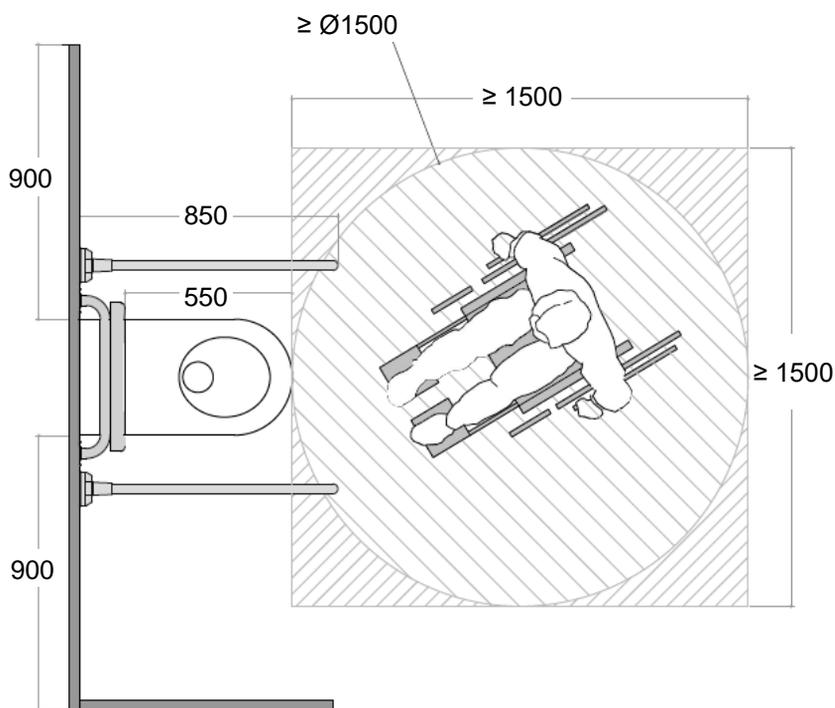

	DIN 8040-1	ÖNORM B 1600
Sitzhöhe des WC-Sitzes	460 – 480 mm	460 – 480 mm
WC – Tiefe von der Beckenvorderkante bis zur rückwertigen Wand	≥ 700 mm	≥ 650 mm
Bewegungsfläche vor dem WC	mind. 1500 x1500 mm	Mind. Ø 1500 mm
Klappgriffe	Beidseitig Oberkante Griff 280 mm über Sitzhöhe	Beidseitig OKFF bis Oberkante Griff 750 – 850 mm
Horizontaler Abstand zwischen den Griffen	650 – 750 mm	650 – 750 mm
Fernauslösung	links und rechts	links und rechts
Integrierter Papierrollenhalter	links und rechts	links und rechts
Rückenstütze	550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens	Ab einer Sitztiefe von ≥ 550 mm. 550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens, in einer Höhe von 600 – 750 mm

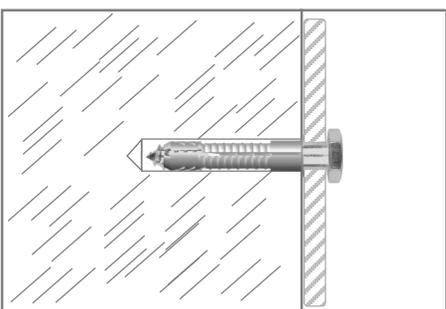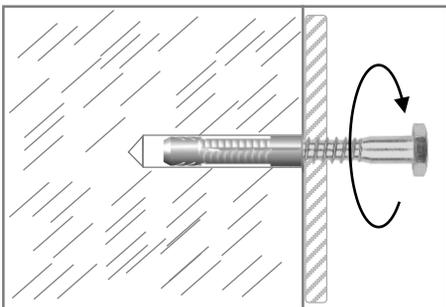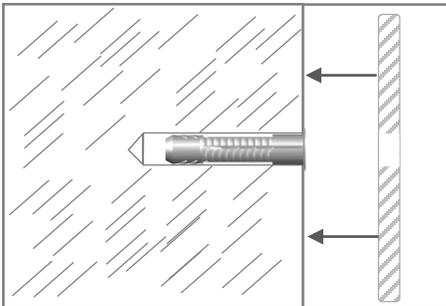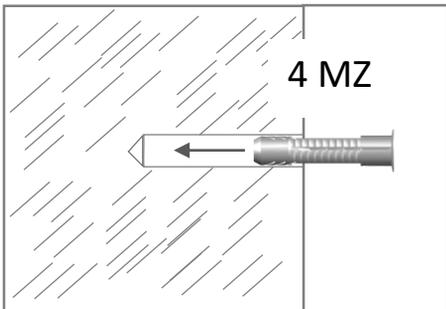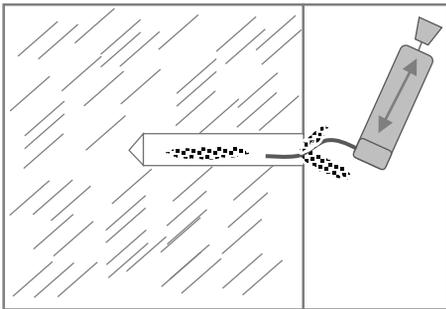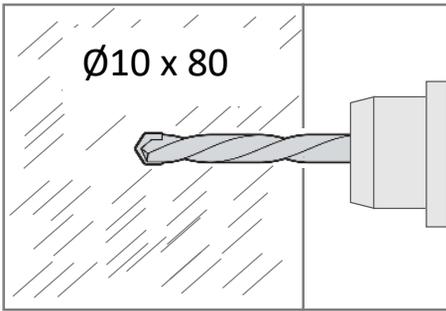




Montagehinweis:

Zur Befestigung der Griffe an massiven Wänden wird das Standard- Befestigungsmaterial mitgeliefert, es besteht aus:

Mehrzweckdübel 4 MZ 10 x 59 und
Sechskant-Holzschrauben A2 8 x 80 DIN 571


Geeignet zur Befestigung an folgenden Wandtypen:
Beton B 25, Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel M 20, Kalksandvollstein KS 12, Vollstein-Leichtbeton V4

Bei Wandtypen die in dieser Erläuterung nicht angeführt sind, muss eine Fachfirma für Befestigungstechnik hinzugezogen werden.

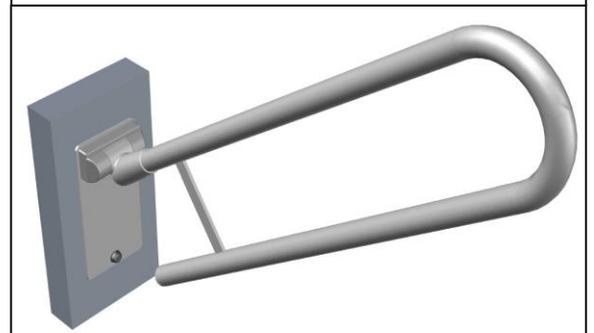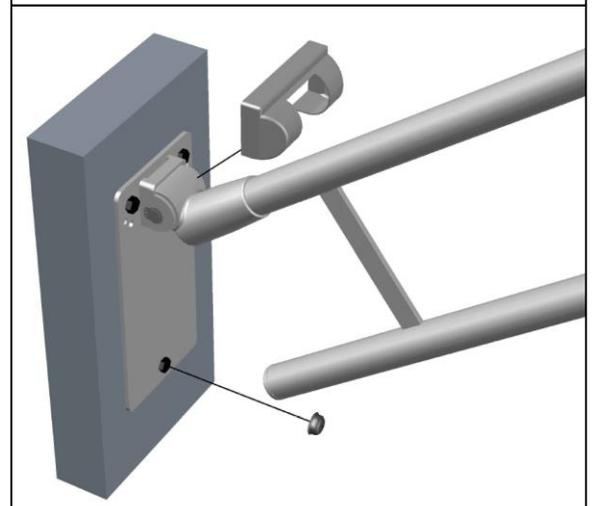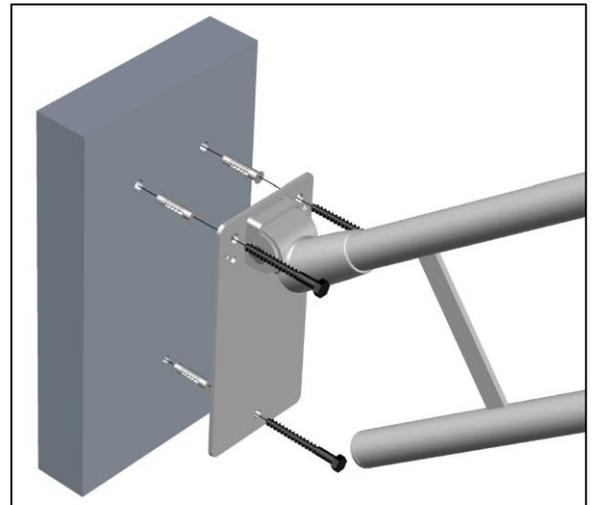


Montagehinweis:
Bohrlochgeometrie:


Stützklappgriffe A-Serie

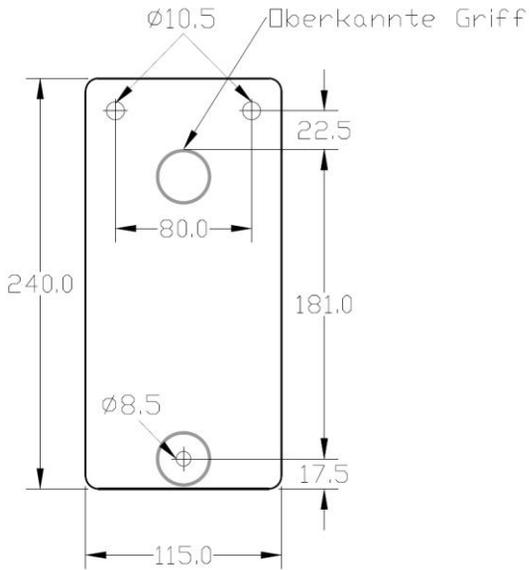



Stützklappgriffe B/E-Serie

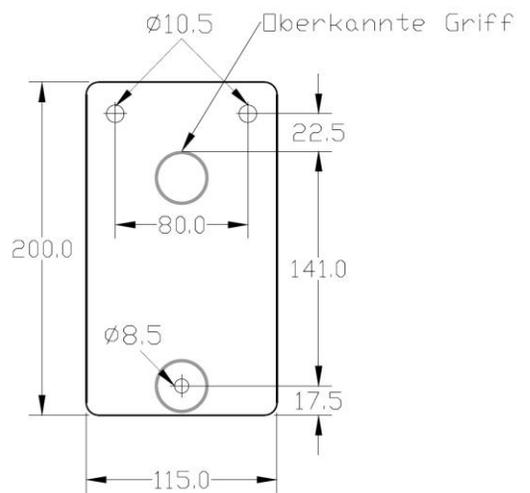

Wandstützgriffe A-Serie

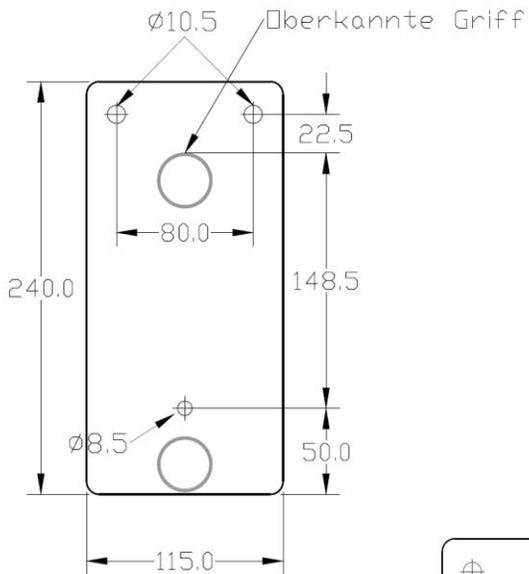


Wandstützgriffe B/E-Serie

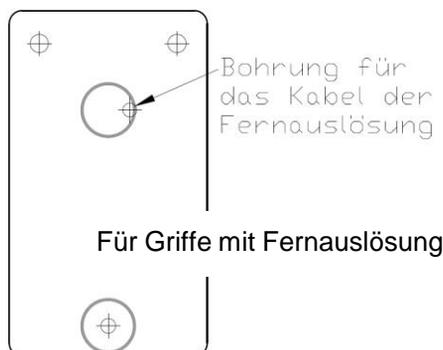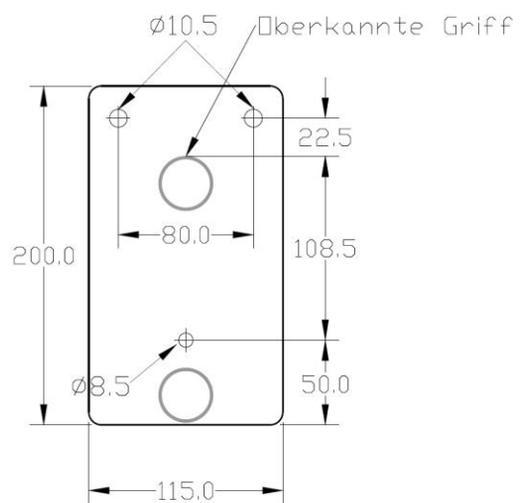



Montagehinweis:

Montage der Rückenstütze A124.0:

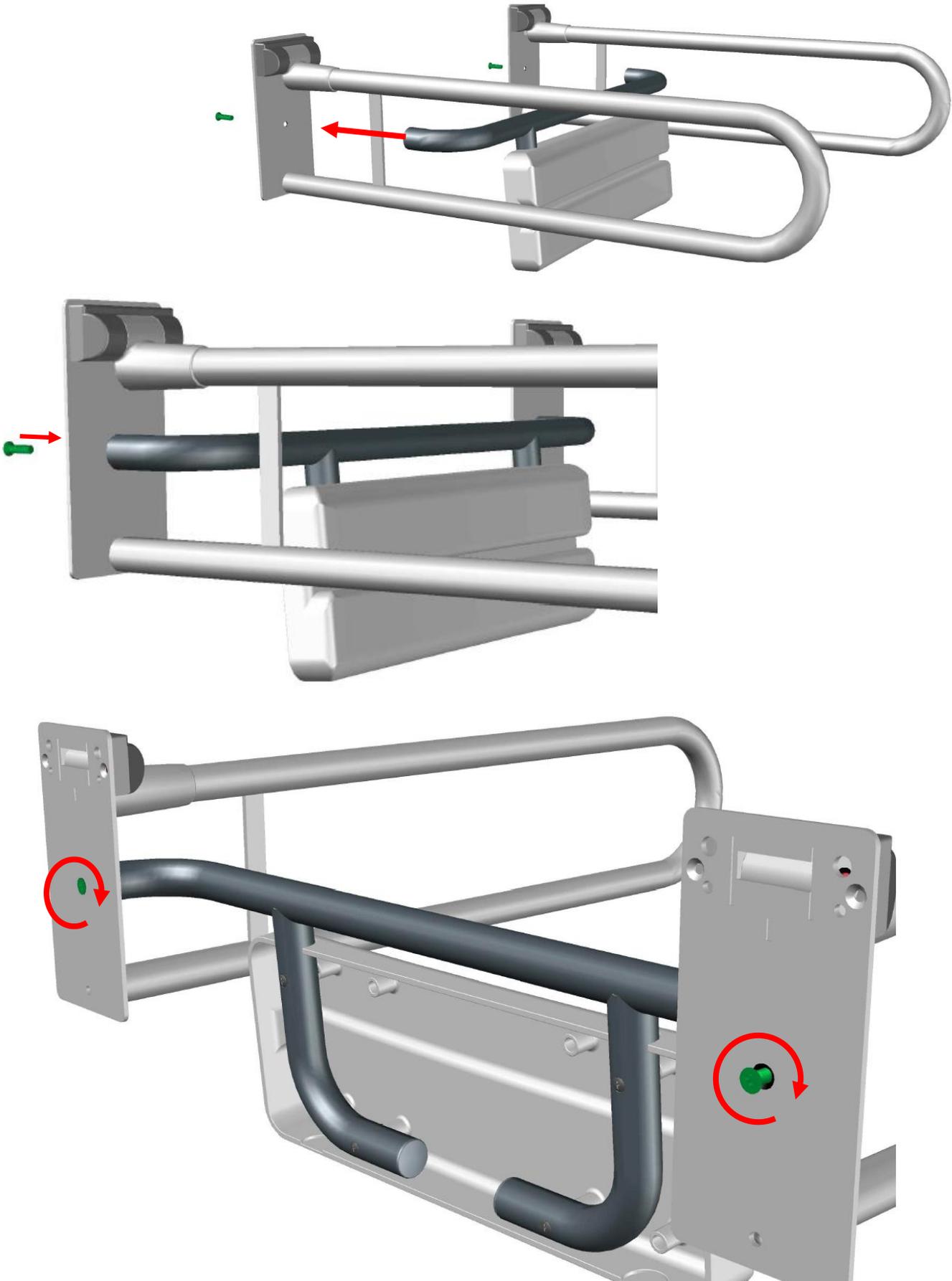


Montagehinweis:

Montage der Bodenstütze H=685 und H=725:

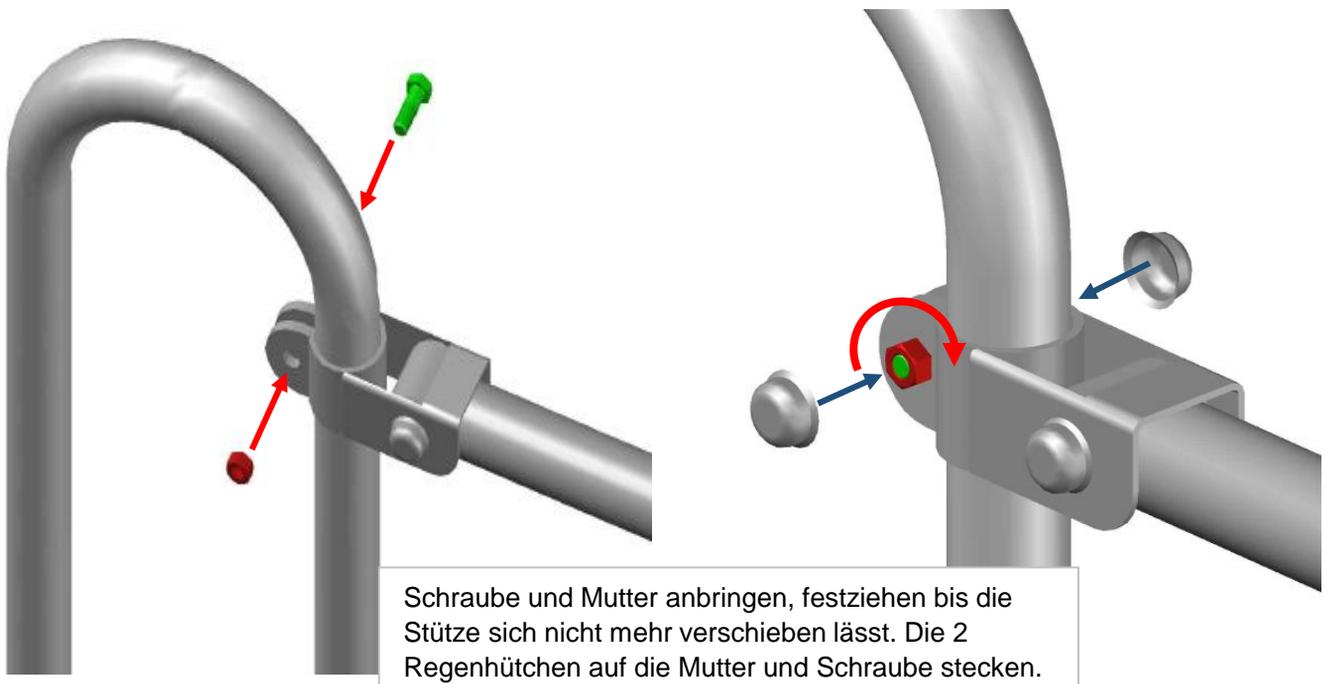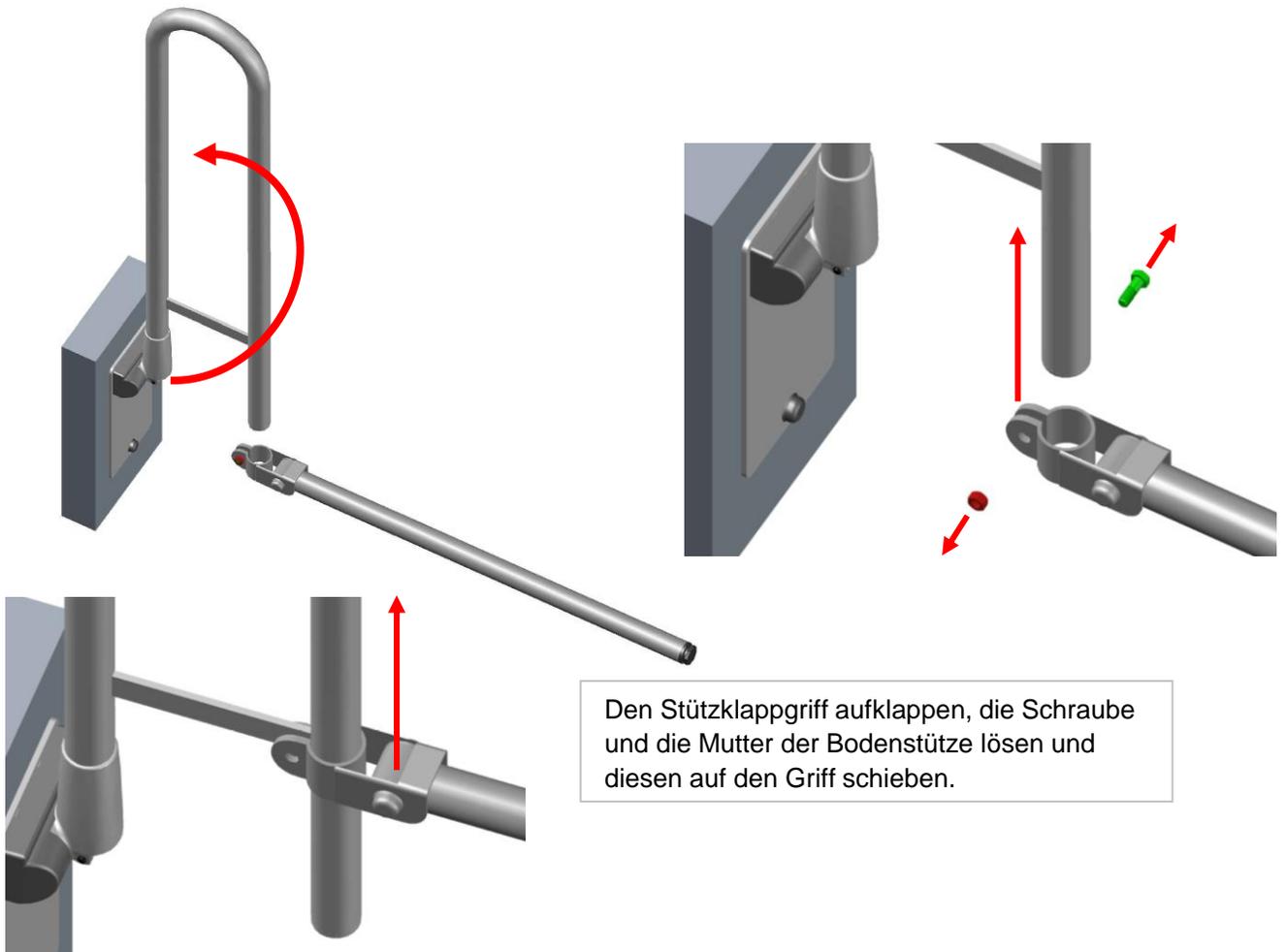


Montagehinweis:

Montage der Bodenstütze H=685 und H=725:

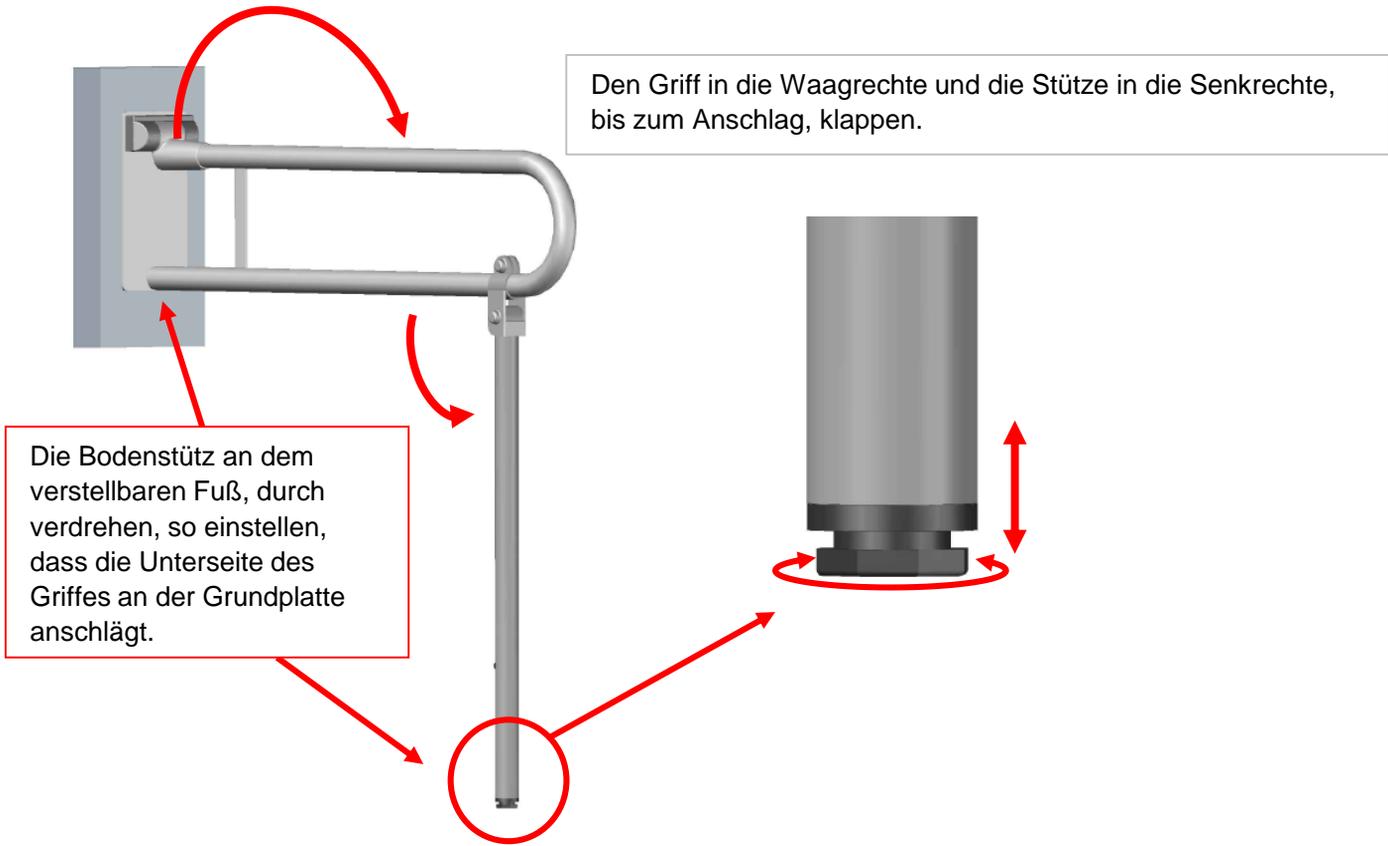


Montagehinweis:

Umbau des integrierten Papierrollenhalter von rechts auf links:

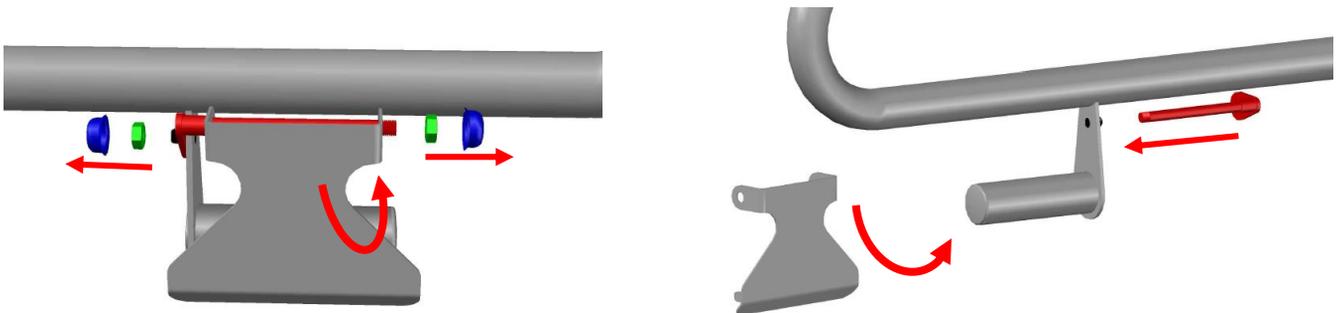


Regenhütchen (blau) und Muttern (grün) entfernen, Achse (rot) spiegelverkehrt auf die Halterung aufstecken, mit Mutter fixieren und Regenhütchen aufstecken. Die Bremse auf die Achse schieben und mit der Mutter fixieren, Regenhütchen aufstecken.

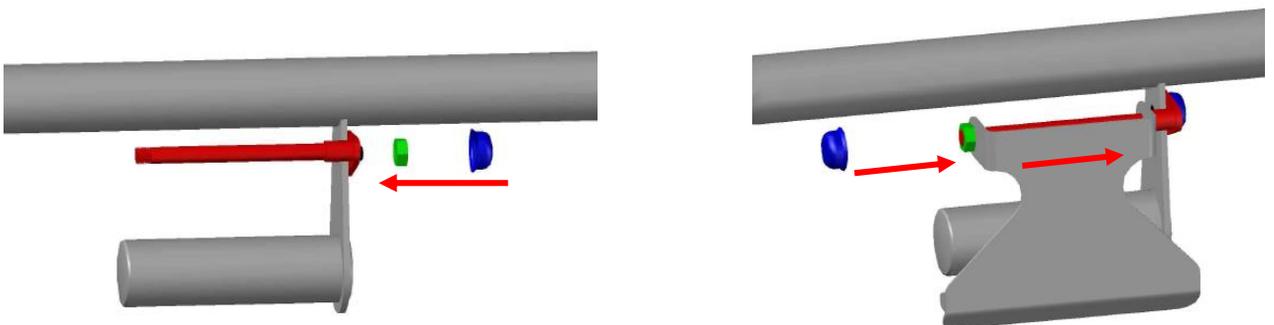

Montagehinweis:

Montage des Papierrollenhalters einhängbar

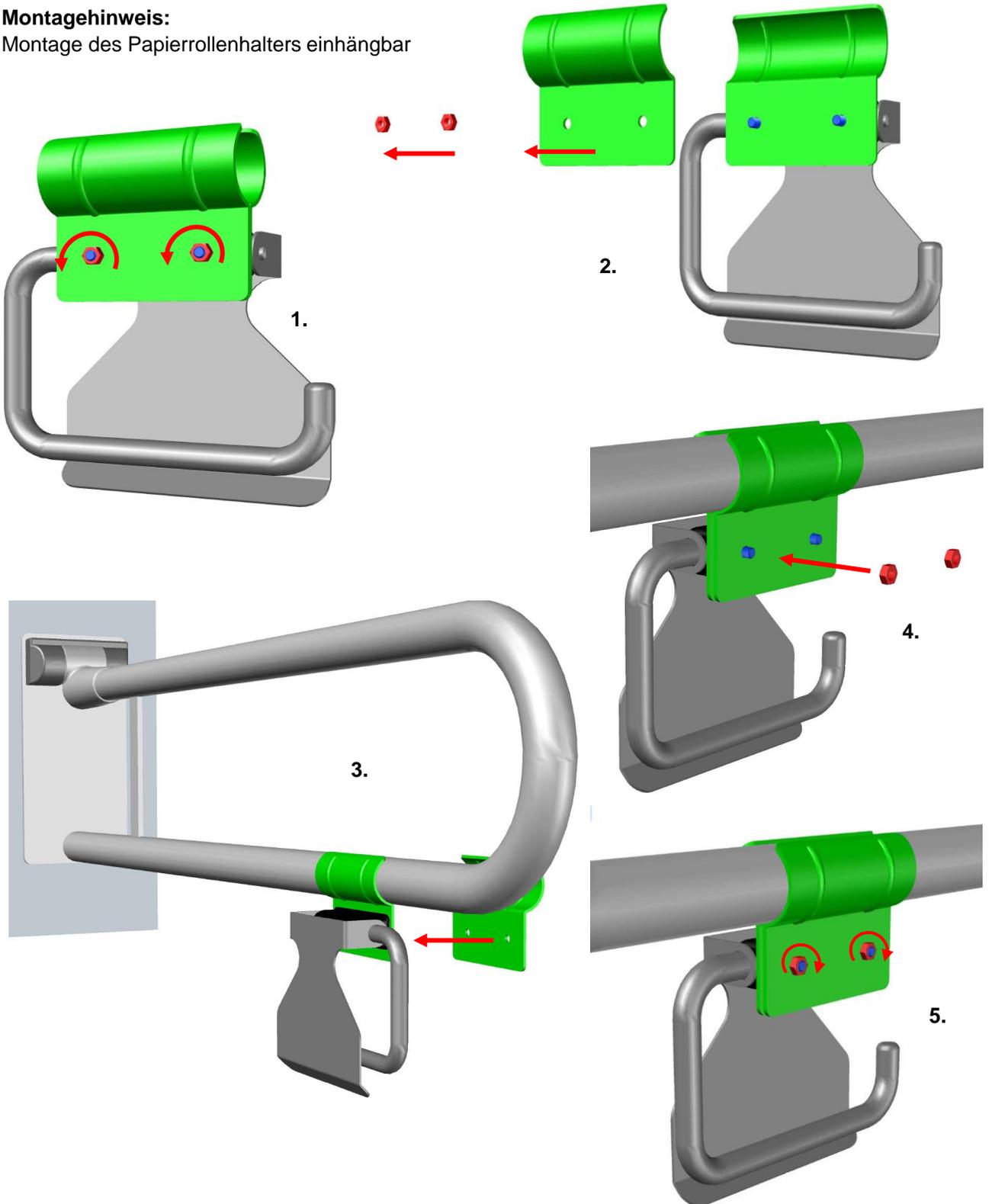


Zubehör:

	Funksender
	Bestellnummern
	533390

Zubehör:



Bodenstütze für Stützklappgriffe nachrüstbar:				
	Bestellnummern			
	GRIP	GLATT	GRIP Color	GLATT Color
A-Serie:	537644	537645	517083	537646
B-Serie:	537647	537648	517084	537649

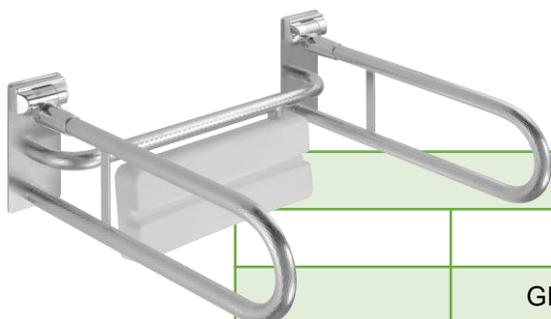

Rückenstütze:				
	Bestellnummern			
	GRIP	GLATT	GRIP Color	GLATT Color
A 124.0	533410	538819	517120	537558
A 124.1	433410	438819	417120	437558
A 124.2	433411	438820	417121	437559



Papierrollenhalter einhängbar:				
	Bestellnummern			
	GRIP	GLATT	GRIP Color	GLATT Color
A 92.0 re.		533509		535854
A 92.5 li.		537617		536200



Armpolster schwarz oder weiß:				
	Bestellnummern			
Länge/Farbe	250 mm/schwarz	450 mm/schwarz	250 mm/weiß	450 mm/weiß
	538324s	537607s	538325w	537607w

Gesamtdimensionen:


Gesamtdimension Stützklappgriffe A/B-Serie:

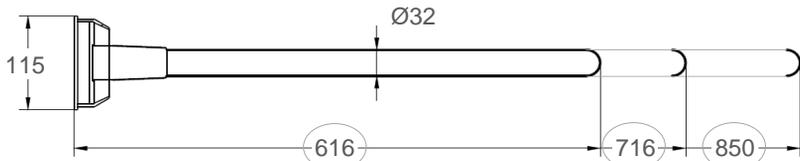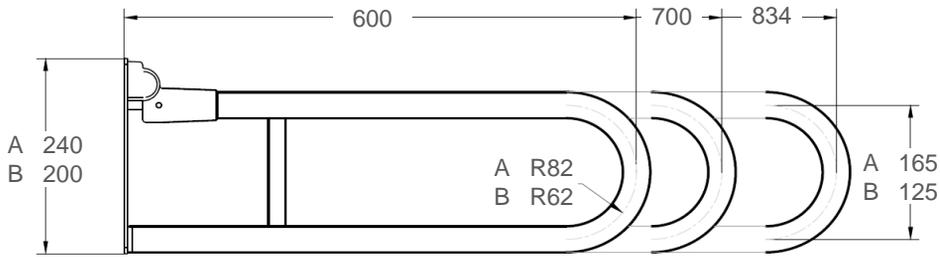


Griffe des
Typs A 82....
B 82....

Griffe des
Typs A 83....
B 83....

Griffe des
Typs A 81....
B 81....

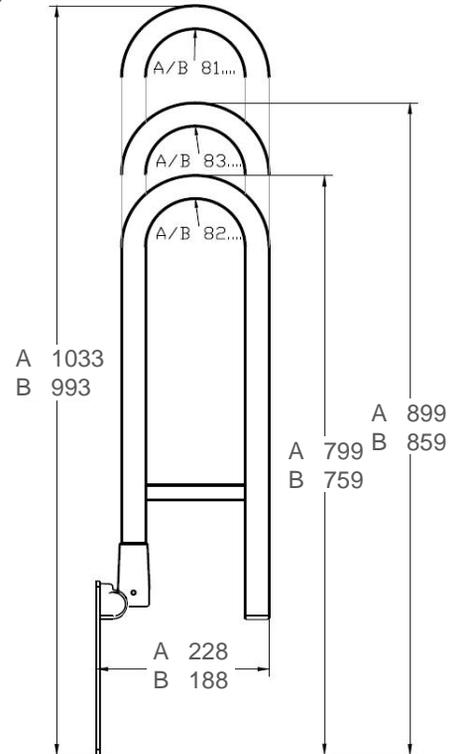


Gesamtdimension Stützklappgriffe A/B-Serie:

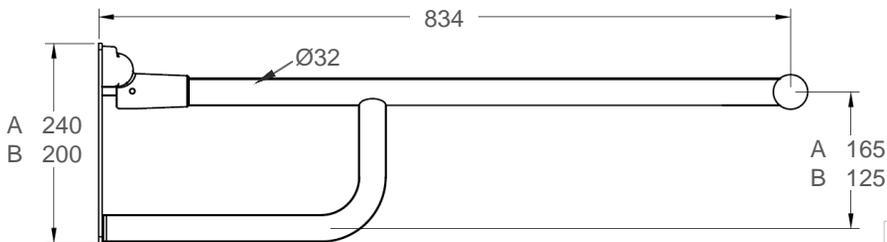


Griffe des
Typs A 84....
B 84....





Gesamtdimension Stützklappgriffe E-Serie

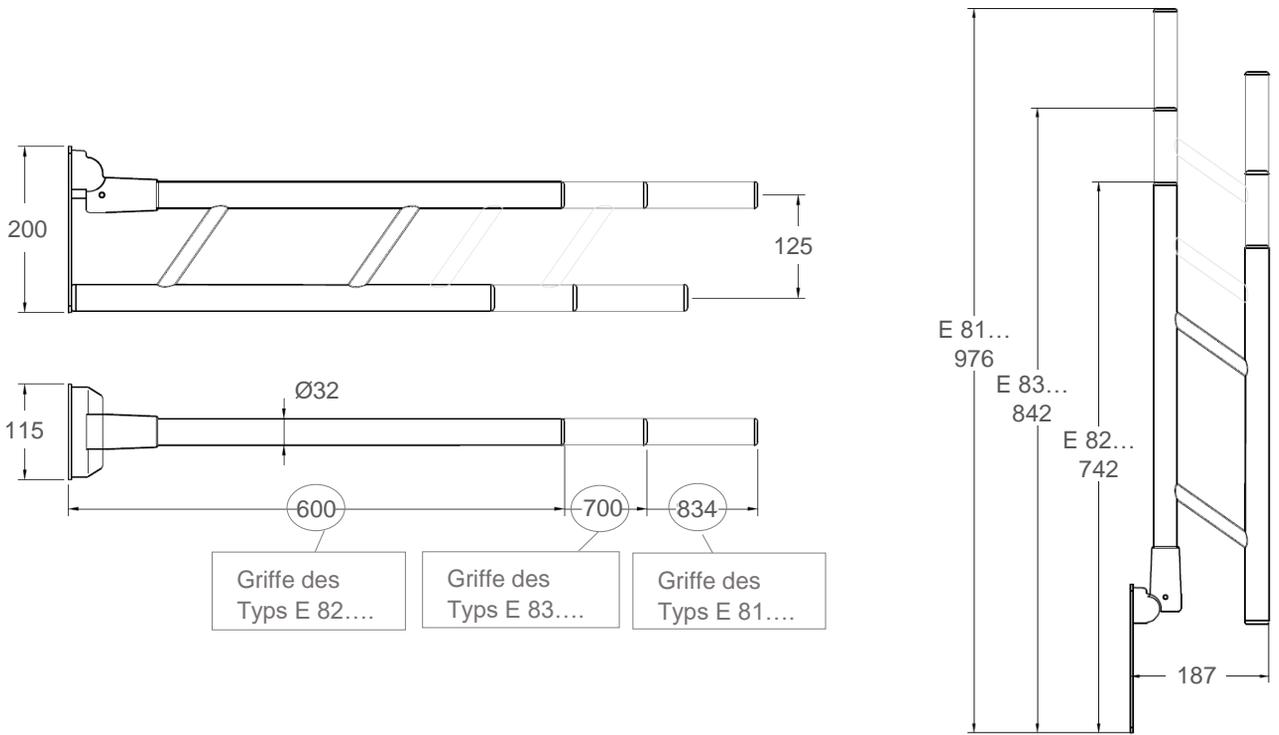



Dimension Stützklappgriffe B/E-Serie mit Papierrollenhalter:

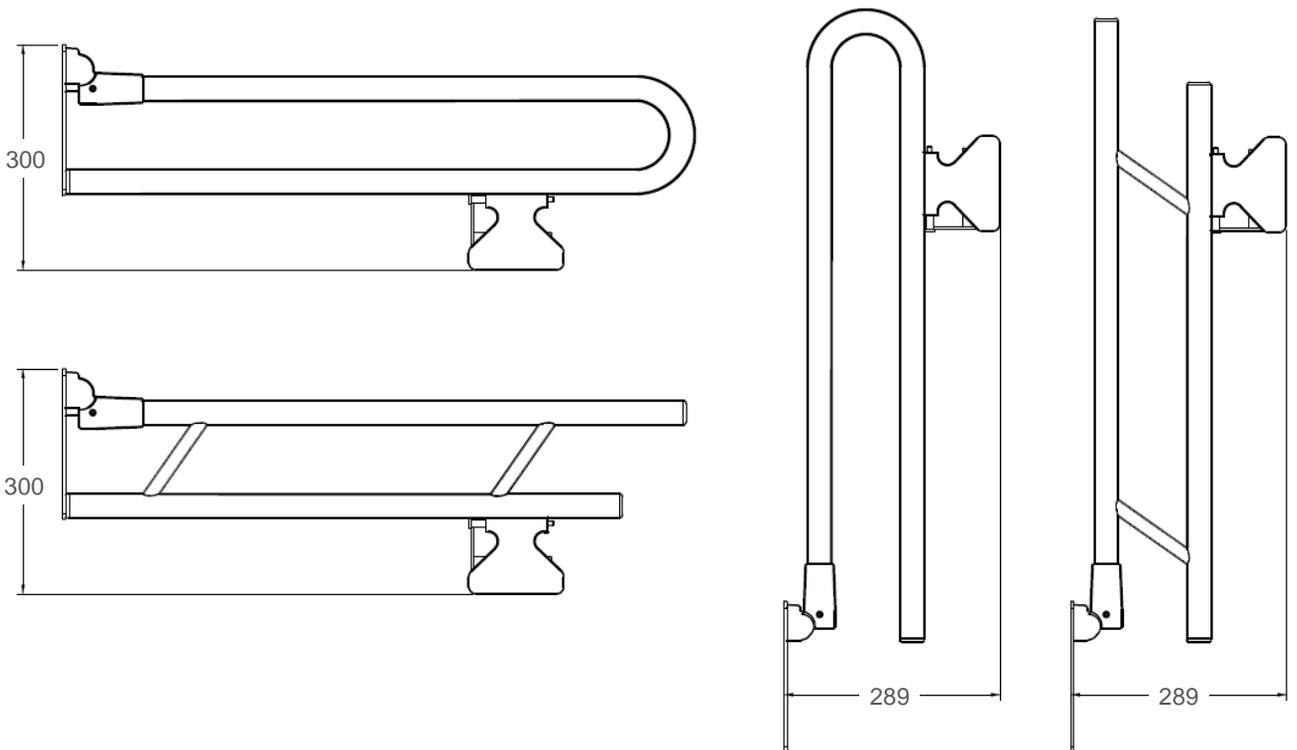


Gesamtdimension Wandstützgriffe A/B-Serie:

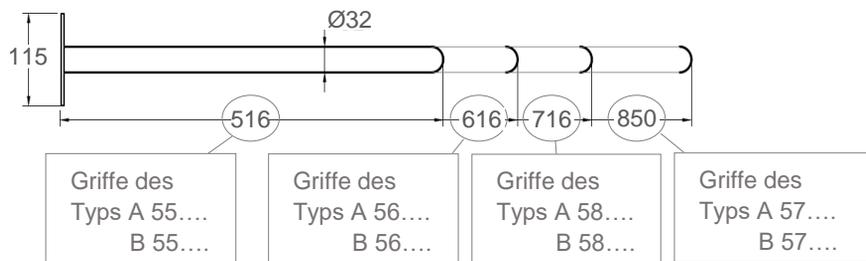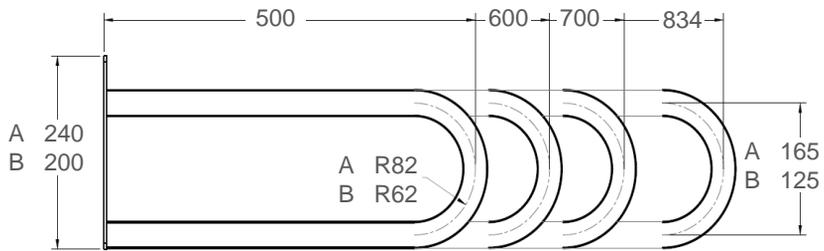

Gesamtdimension Wandstützgriffe E-Serie:

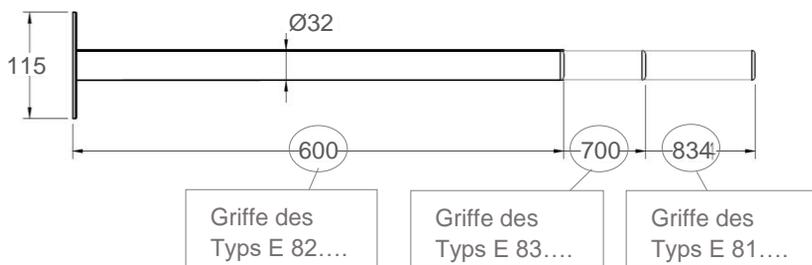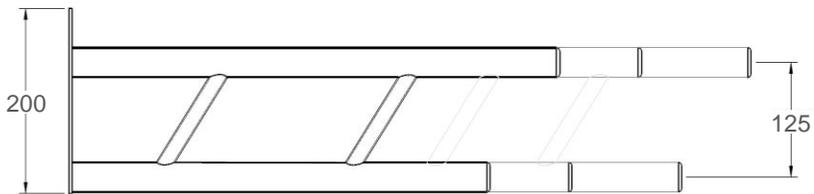

Dimension Wandstützgriffe B/E-Serie mit Papierrollenhalter:

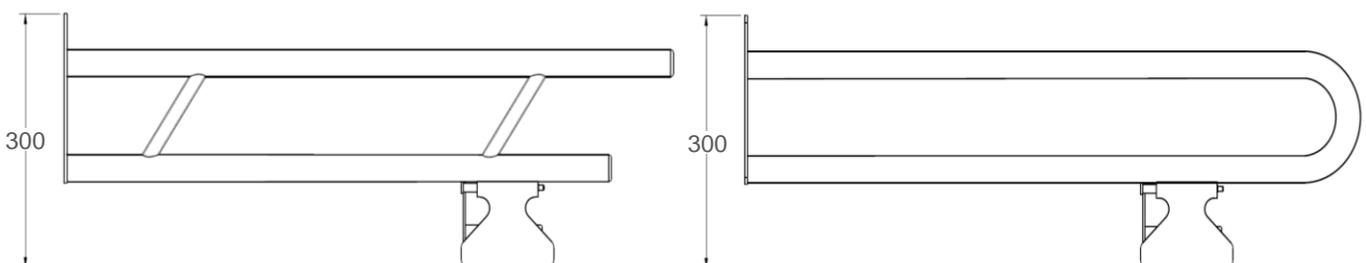

Masse der Griffe:

Masse Wandstützgriffe:

Typ:	Gewicht:
A 55.0	1,9 kg
A 56.0	2,2 kg
A 58.0	2,4 kg
A 57.0	2,7 kg
A 58.1	2,8 kg
A 57.1	3,1 kg
A 57.2	2,7 kg
B 55.0	2,0 kg
B 56.0	2,2 kg
B 58.0	2,4 kg
B 57.0	2,7 kg
B 58.1	2,8 kg
B 57.1	3,1 kg
B 57.2	2,7 kg
E 56.0	2,1 kg
E 57.0	2,6 kg
E 58.0	2,2 kg

Masse Stützklappgriffe:

Typ:	Gewicht:	Typ:	Gewicht:
A 81.0	3,6 kg	B 81.0	3,4 kg
A 82.0	3,0 kg	B 82.0	2,9 kg
A 83.0	3,3 kg	B 83.0	3,0 kg
A 81.3	3,6 kg	B 81.3	3,4 kg
A 83.3	3,3 kg	B 83.3	3,0 kg
A 81.4	4,0 kg	B 81.4	3,8 kg
A 83.4	3,7 kg	B 83.4	3,5 kg
A 81.6	4,0 kg	B 81.6	3,8 kg
A 83.6	3,7 kg	B 83.6	3,5 kg
A 81.1	3,5 kg	B 81.1	3,2 kg
A 82.1	2,9 kg	B 82.1	2,7 kg
A 83.1	3,1 kg	B 83.1	3,0 kg
A 81.2	3,5 kg	B 81.2	3,2 kg
A 83.2	3,1 kg	B 83.2	3,0 kg
A 81.5	3,9 kg	B 81.5	3,8 kg
A 83.5	3,5 kg	B 83.5	3,3 kg
A 81.7	3,9 kg	B 81.7	3,8 kg
A 83.7	3,5 kg	B 83.7	3,3 kg
		E 81.0	3,3 kg
		E 82.0	2,8 kg
		E 83.0	2,9 kg



rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung muss vom Monteur an den Benutzer weitergegeben und für die Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden.

Pflege- und Betreuungspersonal ist verpflichtet die Benutzer unserer Produkte laut dieser Information zu Unterweisen.

Auf diese und weitere Informationen, können Sie auch auf unserer Homepage www.rehagrip.at zugreifen.



Christian Stögerer e.U.
Gaudenzdorfer Gürtel 73a
1120 Wien

Tel. (+43) 1-810 57 40
Fax (+43) 1-810 57 40 – 28
E-Mail office@rehagrip.at

